




Monteringsanvisning Framåtvända tippskydd Vinkelställbara benstöd Aquatec Ocean2




Varning! Tippskyddet rekommenderas att monteras då vinkelställbara benstöd används på AQUATEC OCEAN serien.

Montering framåtvända tippskydd

1. Ta bort plastpluggarna.

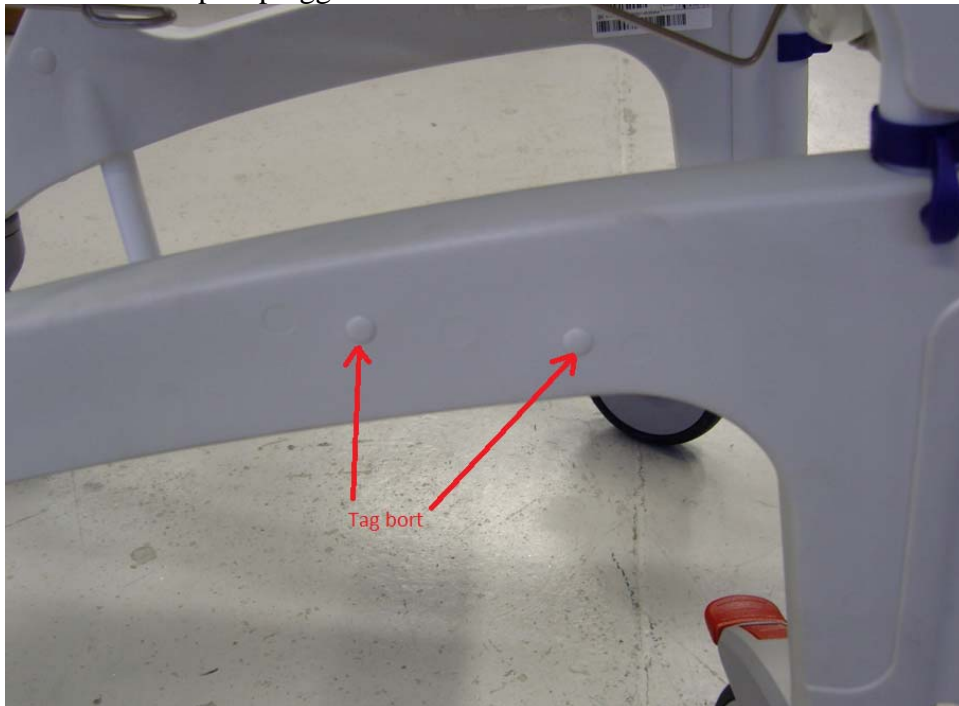

2. Material per sida.

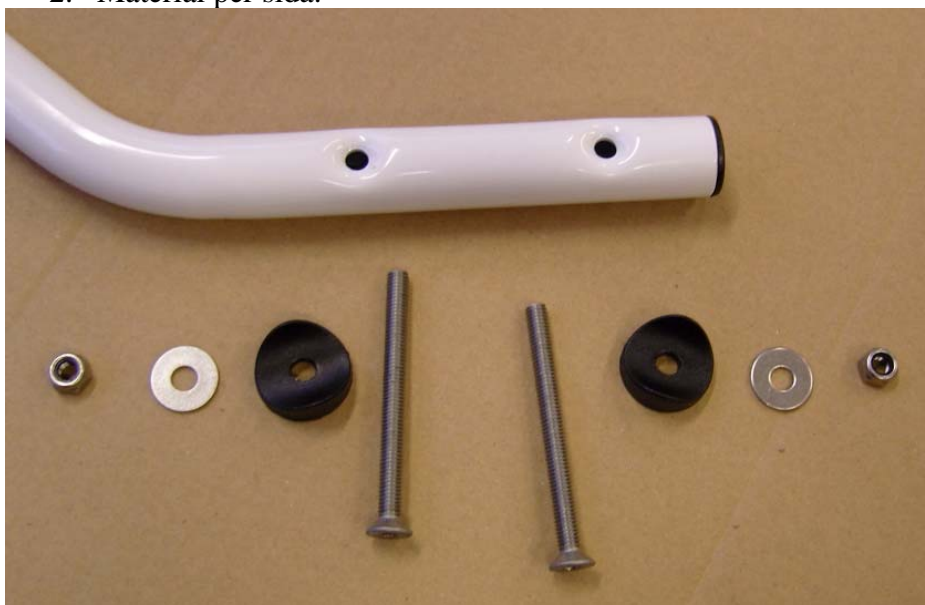



Monteringsanvisning Framåtvända tippskydd Vinkelställbara benstöd Aquatec Ocean2

3. Skruvarna i hålen och mellanlägggen monteras enligt bild.



4. Skruva fast tippskydden på stolen enl bild.



Spänn skruvarna med 7nm.



Monteringsanvisning Framåtvända tippskydd Vinkelställbara benstöd Aquatec Ocean2

5. Monterat. Skall alltid vara ett par. Vä + Hö.



! Kontrollera att tippskyddet sitter ordentligt fast.



Monteringsanvisning Framåtvända tippskydd Vinkelställbara benstöd Aquatec Ocean2

Montering av vinkelställbara benstöd, med vadstöd och fotplatta.



1. Placera det vinkelställbara benstöds staget i fotstödens monteringsrör.



2. Säkerställ att monteringshålen för det vinkelställbara benstödet och monteringsrörets hål är på samma nivå.



3. Tryck in monteringsklämman in i monteringsröret, vidare igenom det vinkelställbara benstödet hål.




Varning! Säkerställ att klämman är rätt monterad och att det vinkelställbara benstödet är korrekt monterad.



Monteringsanvisning Framåtvända tippskydd Vinkelställbara benstöd Aquatec Ocean2



4. Fotstödet på den vinkelställbara fotplattan kan enkelt ställas i olika höjder.

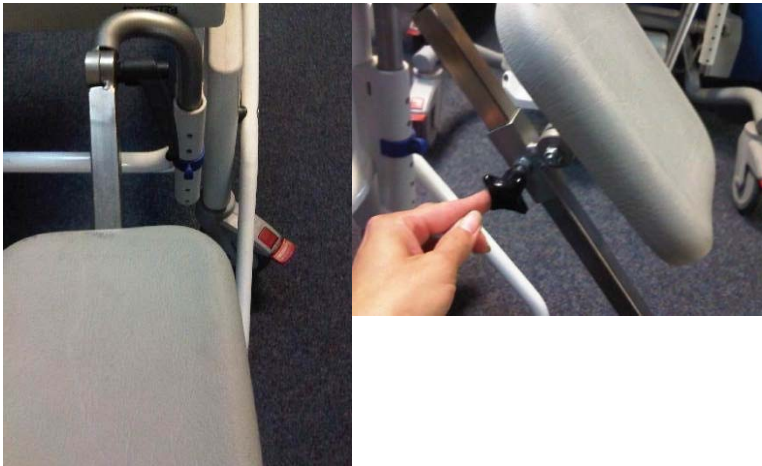

5. Vadstödet kan ställas i olika höjder, samt även regleras i vinkel med hjälp av stjärn vredet.



6. Fotstödet kan vinkelställas med hjälp av en spak, och höjden för fotstödet kan justeras med en stjärn vredet.



Varning! Säkerställ att vadstödet och fotstödet på det vinkelställbara benstödet, är inställt på rätt sätt för brukarens behov.