



BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering.

Dette produkt skal monteres af en erfaren terapeut eller tekniker. Dette dokument indeholder vigtige informationer, der skal viderebringes til brugeren ved levering.

Før du beslutter, hvor selen skal placeres, kontrollér, at brugeren sidder i den mest optimale position med bagdelen så langt tilbage i sædet som muligt.

TRANSPORT I BIL OG BUS

Invacare seler er kun designet til at yde positionerende støtte og bør derfor ikke bruges til fastspænding af passagerer under transport. Der bør altid bruges en separat 4-punkts bespænding, venligst se transportafsnittet i brugermanualen til kørestolen..

VEDLIGEHOELDELSE

Før hver anvendelse:

Foretag en visuel kontrol efter flænget stof og løse eller slidte skruer.

Halvårligt:

Sørg for at alle seler undersøges for løse eller slidte lukninger, og at drejemomentsindstillingerne kontrolleres af en velkvalificeret og kompetent person. For tungere brugere skal perioden mellem inspektionerne reduceres tilsvarende.

Den forventede produktlevetid for dette produkt er 30 måneder.

BEGRÆNSNINGER I BRUGEN

Invacare seler er kun designet til at yde positionerende støtte og bør derfor ikke bruges alene til fastspænding af passagerer under transport. Se venligst afsnit 2 ovenfor "Transport i bil og bus".

VEJLEDNING

Hvis du af den ene eller anden årsag får brug for ekstra vejledning vedr. montering af dette produkt, venligst kontakt os på det nummer, der er angivet nedenfor for rådgivning og support

KOMPATIBILITET

Invacare seler er designede til brug sammen med Rea kørestolssortimentet.



KVALITET

For at overholde vores politik om vedvarende forbedringer, forbeholder vi os retten til at ændre design uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Produktsortimentet for bispændingsseler kan rengøres med et neutralt vaskemiddel (fx varmt sæbevand) og / eller en klud. De nylondækkede neoprenunderlag kan let fjernes og kan maskinvaskes ved 60°C og bør lufttørres. De er ikke velegnede til tørretumbler. Se vaskemærkaten.

Beslag kan rengøres med almindelige husholdningsrengøringsmidler og en blød klud. Hvis produktet bliver forurennet, venligst søg rådgivning hos din infektions kontaktperson. Opbevares i tørre omgivelser.



GIV AGT



- Sørg for at den centrale del (kraveområdet) på selen ikke anbringes oven over brystbenet (øverst på brystbenet), da dette kan medføre risiko for kvælning.

SIKKERHED

- Bispændingsselen er kun designet til at yde positionerende støtte og bør derfor ikke bruges alene til fastspænding af passagerer under transport. Der skal altid anvendes en separat 4-punkts sikkerhedssele til passagerer.
- Selen skal tilpasses over brystbenet og må ikke anbringes rundt om nakken. Tillad tilstrækkelig plads mellem nakken og selen for at sikre, at der ikke opstår risiko for kvælning.
- Anvend den altid sammen med et tilpasset hoftebælte og rygstøtte, der sikrer, at bækkenet er godt støttet for at minimere risikoen for, at brugeren glider frem på sædet og kvæles af selen.
- Vær opmærksom på, hvor selens remme anbringes, og det bør sikres, at de ikke kommer i berøring med nogen bevægelige dele, skarpe eller hårde kanter.

A



Sternum sele
Antal: 1

Størrelse	Art nr.
Medium	1525276
Stor	1525277

B



Dynamisk H-sele
Antal: 1

Størrelse	Art nr.
Lille	1525278
Medium	1525279
Stor	1525280

C



Skulder sele
Antal: 1

Størrelse	Artnr.
Lille	1525273
Medium	1525274
Stor	1525275

D



Dynamisk bryststøtte
Antal: 1

Størrelse	Artnr.
Medium	1525284
Stor	1525285

E



Monterings-bøjler
Antal: 2

Størrelse	Art nr.
19mm	1525288
22mm	1525288
25mm	1525288

F



Flo-tech PT fladeskruer
Antal: 2

G



Rembeslag
Antal: Par

MONTERINGSVEJLEDNING

TRIN 1—Tag selen og beslag ud af indpakningen.

TRIN 2— Hvis du modtager dette produkt i en utilfredsstillende tilstand, kontakt venligst leverandøren.

TRIN 3—Ret hullerne i de øverste monteringsplader på selen (se fig. 1) ind efter de skruer, der fastgør L-beslaget til den bagerste beklædning (se fig. 2).

TRIN 4 - Montering kan også foretages til kørestolens chassis ved hjælp af universale monteringsbøjler, der er velegnede til runde rørstel på 19mm, 22mm og 25mm (se fig. 3).

Det anbefales, at alle skruer spændes iht. 8,5Nm.

Rembeslagene (H) kan monteres øverst på den bagerste L-beslag ved hjælp af skruer (G).

Justering af remmene

TRIN 5 – For at kunne tilpasse hvor stramt bispændingsselen skal sidde, kan man trække eller løsne seleenderne (se fig. 4). Tilpas altid i overensstemmelse med et bækkenbælte.

Figur 1



Figur 2



Figur 3



Vejledning for afmontering af sele

Det er let at fjerne og genmontere selerne.

Hver sele er forsynet med et let betjent udløsningsspænde, der løsner selen fra stolen (se fig. 4). Du fjerner selen ved at udløse de øverste spænder med en finger og derefter udløse en af de nederste spænder, så brugeren kommer fri (se fig. 5). Du fjerner selen helt ved at udløse alle fire spænder.

Du genmonterer ved at udføre ovennævnte vejledning i omvendt rækkefølge.

Figur 4



Figur 5



GARANTI

Flo-tech PT bespændingsseler er dækket af en garantiperiode på 12 måneder.