



**BEMÆRK:** Læs venligst den følgende vejledning før montering.

**Dette produkt skal monteres af en erfaren terapeut eller tekniker. Dette dokument indeholder vigtige informationer, der skal viderebringes til brugeren ved levering.**

Før du beslutter, hvor ankelbespændingen skal placeres, kontrollér at brugeren sidder i den mest optimale position med bagdelen så langt tilbage i sædet som muligt.

### TRANSPORT I BIL ELLER BUS

Invacare anbefaler ikke brug alene af ankelbespænding under transport i bil eller bus.

### VEDLIGEHOLDELSE

Før hver anvendelse:

Foretag en visuel kontrol efter løse skruer, slidte komponenter og beslag.

Halvårligt:

Sørg for at alle ankelbespændinger undersøges for revner, løse eller slidte lukninger, og at drejemomentsindstillingerne kontrolleres af en velkvalificeret og kompetent person.

Den forventede produktlevetid for dette produkt er 30 måneder.

### BEGRÆNSNINGER I BRUGEN

Ankelbespændingerne er designet som støtte af fødder og ankler til et bredt udvalg af brugere. De er designet til at give en enkel, komfortabel og effektiv støtte som hjælp til at maksimere funktion og opretholde en hensigtsmæssig positionering.

Ankelbespændingerne passer til de fleste kørestole med fodplader.

### UDDANNELSE

Hvis du af den ene eller anden årsag får brug for ekstra uddannelse vedr. montering af denne hardware, venligst kontakt os på det nummer, der er angivet nedenfor, for gratis rådgivning og support

### KOMPATIBILITET

Dette produkt er kompatibelt med de fleste kørestole med fodplader.

### KVALITET

For at overholde vores politik om vedvarende forbedringer, forbeholder vi os retten til at ændre design uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes.

### VEDLIGEHOLDELSE

Ankelbespændingen kan rengøres med et neutralt vaskemiddel (fx varmt sæbevand) og / eller en klud. De nylondækkede neoprenunderlag kan let fjernes og kan maskinvaskes ved 60°C og bør lufttørres. De er ikke velegnede til tørretumbler. Se vaskemærkaten. Spænder og beslag kan rengøres med almindelige husholdningsrengøringsmidler og en blød klud. Hvis produktet bliver forurenet, venligst søg rådgivning hos din infektions kontaktperson.  
Opbevares i tørre omgivelser.



### GIV AGT



Venligst læs omhyggeligt alle instruktioner for at sikre sikker og komfortabel brug.

A



**Ankelbespænding**  
1 par

B



**D-beslag**  
Antal: 4

C



**Skruer**  
Antal: 8

D



**Spændeskiver**  
Antal: 8

E



**Glider**  
Antal: 4

F



**Møtrikker**  
Antal: 8

**BEMÆRK:** Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering.

Invacare ankelbespænding er designet til at give den bedste fodstøtte til et bredt segment af brugere. Du er velkommen til at kontakte Invacare, hvis du har behov for yderligere vejledning i brug af vores produkter. Disse produkter er designet til støtte af positioneringen, og monteringen skal foretages af tilstrækkeligt kvalificerede og kompetente personer fx terapeuter.

## MONTERINGSVEJLEDNING

TRIN 1—Tag ankelbespændingerne og beslag ud af indpakningen.

TRIN 2— Hvis du modtager dette produkt i en utilfredsstillende tilstand, kontakt venligst leverandøren.

TRIN 3—Anbring D-beslaget (B) på det ønskede sted på fodpladen. Afmærk fodpladerne gennem hullerne i svejsemøtrikken (se fig. 1)

TRIN 4 – Bor huller, hvor der er afmærkninger, med et 6mm bor (se fig. 2). Undgå ribber på fodpladens underside, hvis det er muligt.


TRIN 5 – Indsæt skrue (C) gennem D-beslaget (B) og fodpladen ind i spændeskiven (D) og møtrikken (F) (se fig. 3). Brug en fastnøgle og en 8mm nøgle til at spænde efter.

**Det anbefales, at alle skruer spændes iht. 8,5N.**

Figur 1



Figur 2

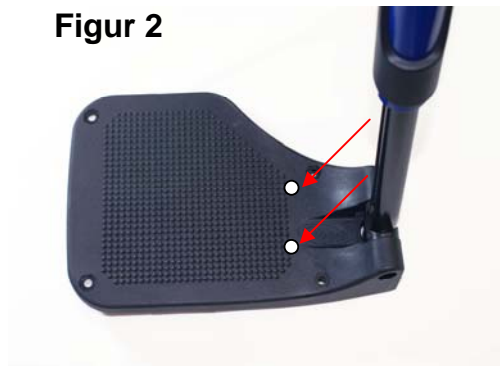

Figur 3



## MONTERINGSVEJLEDNING

### TRIN 6 – Sikring af remmene

Skub glideren på remmen (se fig. 4) og træk remmen fra ankelbespændingen gennem hullet i D-beslaget (se fig. 5).

Træk remmen tilbage gennem glideren (E) (se fig. 6). Gentag trinene 3-6 på den modsatte side af fodpladen.

### TRIN 7 – Justering

Træk ankelremmen gennem spændet og derefter tilbage gennem glideren (E). Brug glideren til at justere remmene, så de passer omkring brugerens ankel.

Figur 4



Figur 5



Figur 6



## GARANTI

Flo-tech PT ankelbespænding er dækket af en garantiperiode på 12 måneder.

Invacare Ltd  
Pencoed Technology Park  
Pencoed, Bridgend CF35 5HZ, UK  
Tlf.: +44 (0) 1656 776222 Fax: +44 (0) 1656 776220  
E-mail: uk@invacare.com Web: www.invacare.com



Dette produkt er produceret i henhold til direktivet om medicinske anordninger.

