



**BEMÆRK:** Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering.

**Dette produkt skal monteres af en erfaren terapeut eller tekniker. Dette dokument indeholder vigtige informationer, der skal videregives til brugeren ved levering.**

#### Tilpasning af Flo-tech PT hoftebælder

Placer bæltet under forreste hofteben (ASIS) og fastgør den til rullestolen i den ønskede vinkel. Det anbefales, at bæltet tilpasses i en vinkel på 45-60 grader til sædet for at opnå de bedste resultater.

Tilpasning af hoftebæltet tværs over den øverste del af låret foran de største trochanter kan hjælpe med til at undgå fremadglidning på sædet.

### TRANSPORT I BIL ELLER BUS

Invacare hoftebælder er kun velegnede til transport, hvis de tilpasses til et sikkert sted på kørestolens chassis. Der skal altid bruges en separat 4-punkts sikkerhedssele, se venligst transportafsnittet i brugermanualen til kørestolen.

### VEDLIGEHOLDELSE

Før hver anvendelse:

Foretag en visuel kontrol efter flænget stof og løse eller slidte skruer.

Halvårligt:

Sørg for at alle hoftebælder undersøges for løse eller slidte lukninger, og at drejemomentsindstillingerne kontrolleres af en velkvalificeret og kompetent person. For tungere brugere skal perioden mellem inspektionerne reduceres tilsvarende.

Den forventede produktlevetid for dette produkt er 30 måneder.

### BEGRÆNSNINGER I BRUGEN

Invacare hoftebælder er kun velegnede til transport, hvis de er monteret til et sikkert sted på kørestolens chassis. Se venligst afsnit 2 ovenfor "Transport i bil eller bus".

### VEJLEDNING

Hvis du af den ene eller anden årsag får brug for ekstra vejledning vedr. montering af denne hardware, venligst kontakt os på det nummer, der er angivet nedenfor, for yderligere rådgivning og support.

### KOMPATIBILITET

Invacare hoftebælder er kompatible med kørestole, som har en rund rørdiameter på 19mm, 22mm eller 25mm diameter.

### KVALITET

For at overholde vores politik om vedvarende forbedringer, forbeholder vi os retten til at ændre design uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Bæltessortimentet kan rengøres med et neutralt vaskemiddel (fx varmt sæbevand) og / eller en klud. Alle Invacare bælder med et plastik klemmespænde kan maskinvaskes ved 60°C og bør lufttørres. De er ikke velegnede til tørretumbler. Se vaskemærkaten.

**BEMÆRK: Bælder med automatisk udløsning skal vaskes med forsigtighed og lufttørres.**

Beslagene kan rengøres med almindelige husholdningsrengøringsmidler og en blød klud. Hvis produktet bliver forurenet, venligst søg rådgivning hos din infektions kontaktperson. Opbevares i tørre omgivelser.



### GIV AGT



- Tilpasning af et hoftebælte over den nederste del af underlivet kan genere mellemgulvet og medføre åndedrætsbesvær.

## SIKKERHED

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det, at bækkenbæltet tilpasses, hver gang det bruges. Hoftebæltet skal strammes tilstrækkeligt, så brugeren ikke glider ned mellem bæltet og sædet.
- Det hoftebæltet er beregnet til at støtte positioneringen og er ikke designet til brug alene under transport. Hvis brugeren bliver siddende i sin kørestol under transport, skal der anvendes en separat sikkerhedssele.
- Dette produkt må ikke anvendes alene som sikkerhedssele.

A



Auto udløsning

B



Plastik  
klemmespænde

C



Dobbeltlås  
Udløsning

D



Monteringsbøjler  
Antal: 2

## MONTERINGSVEJLEDNING

TRIN 1—Tag hoftebæltet og beslag ud af indpakningen.

TRIN 2— Hvis du modtager dette produkt i en utilfredsstillende tilstand, kontakt venligst leverandøren.

TRIN 3—Fastgør de bagerste monteringsbeslag (se fig. 1) til den ønskede position på kørestolens chassis ved hjælp af de universale monteringsbøjler, der er velegnede til runde rørstel på 19mm, 22mm og 25mm (se fig. 2).

**Det anbefales, at alle skruer spændes iht. 8,5Nm.**

Figur 1



Figur 2



**BRUGSVEJLEDNING**
**Justering**

1. Sørg for at brugeren sidder korrekt med bagdelen så langt tilbage i sædet som muligt.
2. Anbring hoftebæltet rundt om brugeren i den ønskede position og skub de to sider af bæltet sammen. Træk for at få bekræftet, at spændet er låst.
3. Justér længden på hoftebæltet ved hjælp af trækremmene på siden/siderne af spændet (se fig. 3). Bæltet skal tilpasses fast uden at medføre ubehag. Der skal være tilstrækkelig plads til, at der er plads til to fingre mellem brugeren og bæltet. Af bekvemmelighedsårsager skal spændes holdes i en midterposition.

**Figur 3**

**Sådan udløses bæltet**

Se tabellen nedenfor

Hoftebælte	Vejledning
Klemmespænde	Klem ved hjælp af tommel- og pegefingern på de to plastik "knapper" øverst og nederst på spændet.
Auto spænde	Tryk på knappen midt i spændet.
Dobbeltlås plastikspænde	Klem ved hjælp af tommel- og pegefingern på de to plastik "knapper" øverst og nederst på spændet, mens du samtidig trykker på den midterste knap.

**GARANTI**

Flo-tech PT hoftebælder er dækket af en garantiperiode på 12 måneder.