


• Démontage

1. Contrôler que les freins des roues soient actionnés.
2. Ajuster la hauteur du lit.
3. Démontez tous les accessoires.
4. Relever le lit jusqu'à la hauteur indiquée, de manière à ce que les cames du guide du cadre inférieur et le croisillon soient en face l'un de l'autre.
5. Déconnecter la fiche du secteur.
6. Démontez la came de verrouillage de l'unité de contrôle.
7. Déconnecter la fiche des moteurs de relève-buste, plicature et relève-jambes et s'assurer que les câbles ne soient pas coincés dans la base.
8. Soulever la partie centrale du plan de couchage.
9. Tirer la partie tête du plan de couchage et abaisser là jusqu'au sol.
10. Soulever les 2 boutons de verrouillage de la partie jambes et les tourner d'un demi-tour en position déverrouiller.
11. Abaisser la partie jambes du plan de couchage et abaisser là jusqu'au sol. Positionner chaque partie du plan de couchage au sol sur les inserts de panneaux.
12. Rebrancher l'alimentation de la base et abaisser là jusqu'à la hauteur minimum.

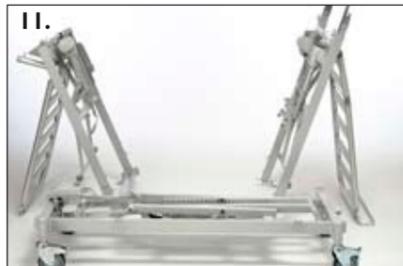

Démontage de la base:

1. Enlever la télécommande et l'unité centrale de la base.
2. Enlever la sécurité de l'unité centrale (côté tête de lit).
3. Soulever le croisillon à la verticale et l'enlever de la base.
4. L'assemblage s'effectue dans le sens inverse comme indiqué dans la figure 4.

Ident. no.: I525012
Version: 01 04.2009




Scanbed 755™

Yes, you can.®

- Utilisation de la rallonge intégrée du plan de couchage
- Montage
- Montage du lit sur kit de transport intégré
- Démontage

• Utilisation de la rallonge intégrée du plan de couchage

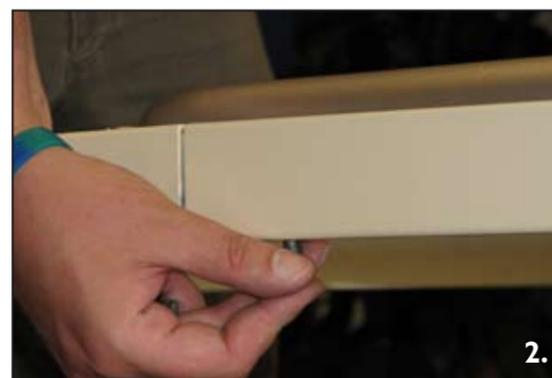


Le lit **SB755™** peut être rallongé au choix de 5 ou 10 cm à la fois en tête ou pied de lit, ce qui fait une distance de rallonge totale de 20 cm. La rallonge se monte à l'aide d'une clé Allen. Cette dernière est rangée sur le côté intérieur du plan de couchage en tête de lit.

1. Démontez la barrière.
- 2a. Partie pied: Desserrez les 2 vis de fixation des inserts de panneaux situés sous le plan de couchage à l'aide de la clé Allen.
- 2b. Partie tête: Desserrez les 2 vis de fixation des inserts de panneaux situés sous le plan de couchage à l'aide de la clé Allen.
3. Tirer le raccord de 5 ou 10 cm, replacer les 2 vis et resserrer.
4. Desserrez les 2 vis situées sous la poignée du relève-jambes, relever complètement la poignée et resserrer.
5. Repositionner le matelas.
6. Remettre la barrière de lit.

• Montage

1. Contrôler que les roues du lit soient freinées.
2. Enlever les barrières et panneaux pour le montage du plan de couchage.
3. Les crochets de transport se relèvent vers l'extérieur, la tige de séparation se rabaisse vers l'intérieur.
4. Rebrancher le cordon secteur.
5. Relever le lit jusqu'à la hauteur indiquée, de manière à ce que les cames du guide du cadre inférieur et le croisillon soient en face l'un de l'autre.

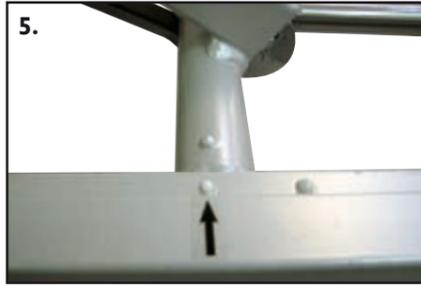

6. Placer la partie tête en bout de lit et la positionner de manière à faire glisser les carrés composites dans le rail prévu à cet effet.

7. Positionner la partie jambes en bout de lit, verrouiller les fixations 'Snap lock' sur le croisillon en plaçant le cadre à l'horizontale. Il est obligatoire de verrouiller le système de fixation 'Snap lock' pour utiliser le lit.



8. Positionner la partie centrale de manière à verrouiller la partie jambes.

9. Verrouiller la partie centrale par appui.



10. Insérer les fiches des moteurs de relève-buste, de plicature des genoux, de relève-jambes et de l'unité centrale et installer le verrou des câbles sur l'unité centrale.

11. Monter les accessoires.

• Montage du lit sur kit de transport intégré

1. Le croisillon doit être abaissé au maximum. Les parties tête et jambes sont positionnées sur la base avec les crochets prévus à cet effet. Pas d'importance sur le positionnement de la partie tête ou partie jambes.



2. Les parties tête et jambes peuvent être inclinées vers l'intérieur lorsqu'elles sont suspendues sur les crochets. Après avoir été disposés à la verticale, les parties tiennent seules.



3. Les parties tête et jambes sont reliées avec une barre de renfort disposée sur le plan de couchage pour s'assurer que les 2 parties ne basculent pas.



4. Les 2 crochets ne sont pas déplaçables. Il est important qu'aucun accessoire ne repose sur ces 2 crochets.



5. Barrières et Panneaux de lit sont positionnés sur les barres de renfort. La potence est installée sur la base côté panneaux.



6. NB! Un matelas peut être glissé entre les parties tête et jambes pour faciliter le transport et la livraison chez le patient.