



Packningsinstruktion

Packning av Aquatec Ocean med länkhjul

A TILLBEHÖR

- 1 Aquatec Ocean med länkhjul
- 2 Transportväska (Artikel nr. 16521)
- 3 Packningsinstruktion (7 sidor)

B PACKNINGSORDNING

- 1 Lägg de båda sidopanelerna i väskan
- 2 Lägg de båda fotstöden i väskan
- 3 Lägg sitsplattan med ovansidan neråt i väskan
- 4 Innan sitsramen packas, montera höjdjusteringsklämmorna i ramen.
- 5 Lägg sitsramen med justeringsrören nedåt i väskan. På detta sätt hamnar justeringsrören vid sidan om sitsplattan och sidodelarna.
- 6 Packning av toalettskål och toalettskålshållare.
Lägg toalettskålshållaren mellan sitsramen och sitsplattan.
Toalettskålen läggs mellan sitsramen och sitsplattan.
- 7 Packning av ryggstödet.
Skruva fast fästskruvarna i hålen.
Lägg ryggstödet med framsidan nedåt i väskan.
Armstöden hamnar då vid sidan om sitsramen och sitsplattan.
- 8 Packning av mjuksitsen.
Lägg mjuksitsen med undersidan nedåt ovanpå ryggstödet.



Insatsen för mjuksitsen kan läggas i mellanrummet vid framsidan.

9 Fastsättning av banden.

Förslut de båda banden och dra åt dem.

Se till att samtliga delar är med och att banden inte vrid när de dras åt.