

Invacare® Accessories

Invacare® Pausa (L865)

no Sidebord for senger
Bruksanvisning

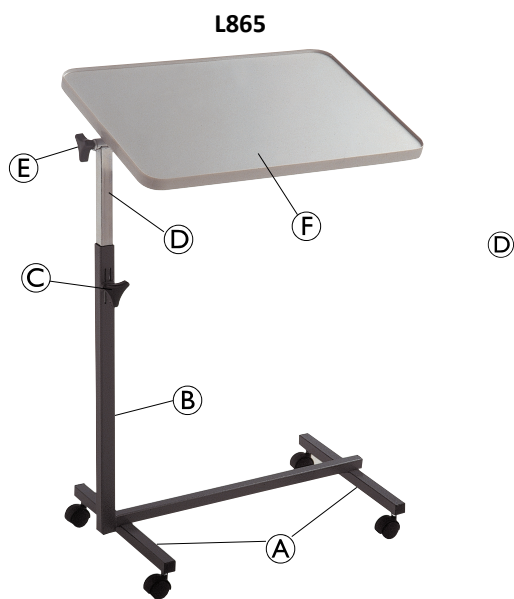



Figure 1

	L865
	10 kg

This manual MUST be given to the user of the product.
BEFORE using this product, read this manual and save for future reference.



Yes, you can.®

Sikkerhet

FORSIKTIG!

- Kontroller at produktet er levert i perfekt stand før du bruker det.
- Hvis du er usikker på bruk, justering eller vedlikehold av produktet, kontakter du Invacare-forhandleren.
- Overskrid ikke løftebøylens maksimumsbelastning som angitt på produktetiketten.
- Produktet skal ikke brukes eller oppbevares utendørs.
- Kontroller regelmessig produktets stabilitet og stivhet, og om eventuelle skruer er strammet.

Rengjøring og desinfisering

- Fjern eventuelt smuss eller støv med en myk, fuktig klut.
- Vanskelige flekker fjernes med såpe og vann.
- Tørk delene med en myk klut.
- Følg hygienespesialistens anbefalinger for desinfisering i sykehusmiljøer.

Garantiopplysninger

Garantivilkårene er en del av de generelle vilkårene som gjelder i hvert land hvor dette produktet markedsføres.

Kontaktopplysningene for ditt lokale Invacare-kontor er angitt på slutten av denne håndboken.

Montering

Invacare®Pausa (L865)

Se figur 1

1. Fest de to føttene på styrehjulene **A** under rammen **B** med 2 skruer.
2. Sett inn håndskruen **C** gjennom den øvre delen av rammen **B**.
3. Skyv det firkantede røret til brettstøtten **D** inn i den vertikale delen av rammen **B**, slik at brettstøtten er over rammesokkelen.
4. Løsne håndskruen **E** og skyv brettet **F** på brettstøtten.
5. Juster brettet til ønsket vinkel og stram håndskruen **E**.
6. Juster brettets høyde og stram håndskruen **C**.

Norge:

Invacare AS Grensesvingen
9, Postboks 6230, Etterstad
N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00
Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com
www.invacare.no



Invacare Portugal, Lda Rua
Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

© 2017 Invacare Corporation. All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

1605015-C 2017-06-09



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®