





Rea<sup>®</sup> **Bellis**  
Rekonditioneringsmanual

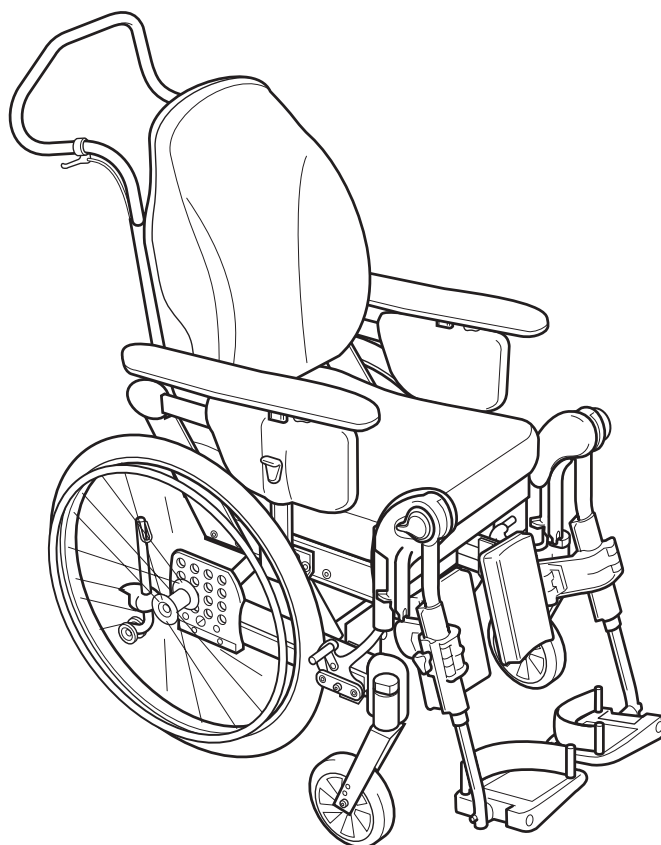

# Innehåll

Produktbeskrivning	3
Tvätt och desinfektion	4
Rekonditionering	5-6
Tillbehör	7
Checklista	8

# Produktbeskrivning REA<sup>®</sup> Bellis

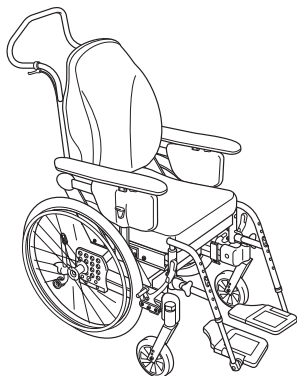

Rea<sup>®</sup> Bellis erbjuder många lösningar som ger hög komfort, enkla inställningar och utmärkta köregenskaper. Bellis många unika egenskaper ökar välbefinnandet hos brukaren.

Det förbättrade *Invacare<sup>®</sup> Flex2* sits- och ryggsystemet gör det möjligt att anpassa rullstolen individuellt samt ge en stabil och komfortabel sittställning.

Rea<sup>®</sup> Bellis' moderna design, enkel justerbar sits och positionering gör att Bellis erbjuder ett mycket bra stöd och hög komfort. Sitsegenskaperna ger extra utrymme när du behöver det som mest och gör det möjligt att sitta komfortabelt under en längre period.

Bellis' kompakta design gör den enkel att köra inomhus och på trånga platser utomhus både för brukaren och vårdaren.

Bellis sits kan tiltas i 15° och ryggstödet vinklas i 30°. För att göra det lättare att hitta den idealiska sittpositionen både i viloläge och vid aktiviteter har Bellis sitstilt en glidande balanspunkt som gör att Bellis är lätt att köra i upprätt ställning och är mycket stabil även när sitsen är tiltad. Designad för att lättare uppnå den idealiska sittpositionen vid vila och under aktivitet.

För att förbättra kompatibiliteten mellan Rea<sup>®</sup> Bellis, Rea<sup>®</sup> Assist och Rea<sup>®</sup> Comfort har ryggstödsfästet ändrats. *Invacare<sup>®</sup> Flex2* sortiment som omfattar ryggstöd, dynor och andra ryggstöd, (tillval), gör det enklare att använda *Invacare<sup>®</sup>* breda tillbehörs sortiment för att uppnå ytterligare komfort.

Den nedre delen av ramen, sitsen, ryggstödsfästet och körhandtagen är tillverkade av högkvalitativt stål. Delar av chassi och sits, fotstödsfäste, armstödsfäste samt ryggsrör är tillverkade av aluminium.

Fotplattor och sidostöd är tillverkade av återvinningsbar plast. Sitsplattan är tillverkad av vakum formad ABS plast. Ryggstödsplattan är tillverkad av trä och överdelen av plast.

Tygklädsor finns i plysch och dartex, båda är tvättbara. Sittdynor och ryggsstödsdynor är tillverkade i polyten.

Rea<sup>®</sup> Bellis finns i tre sittbredder. Varje sittbredd kan justeras 2 cm smalare och 2 cm bredare.

Drivhjulen har quick release funktion och finns i 20", 22" och 24" storlek. Dessutom kan 16" transporthjul väljas. Drivhjulen kan placeras i 16 positioner på drivhjulspattan. Däcken finns som luftpumpade samt halvmassiva. Länkhjulen finns i storlek från 120 mm upp till 200 mm. Länkhjulsgaffeln är fast eller har quick release funktion. Ramen är längdjusterbar.

Benstöden är avtagbara och fotstöden vinkelfasta eller djup- och vinkelställbara. Det är dessutom möjligt att välja fotplatteförlängare till fotplattorna. Armstöden kan enkelt tas av från rullstolen. Armstödsdynorna är mjuka och klädda i dartex.

Ryggstödet är avtagbart varför rullstolen kan transporteras i en kombi.

# Tvätt och Desinfektion

1. Tag av sits- och ryggdynor och tvätta dessa i tvättmaskin, enligt tvättanvisningarna på respektive klädsel.
2. Är rullstolen mycket smutsig rekommenderar vi att rygg och sittplatta plockas bort så att stolen lättare kan spolas ren.
3. Spola av rullstolen med högtrycksstråle eller vanlig vattenstråle beroende på smutsgrad. Spruta ej mot lagringar och dräneringshål. Tvättas rullstolen i tvättmaskin skall gradantalet ej överstiga 60 grader.
4. För att desinficera stolen spraya den med sprit.
5. Spraya rullstolen med tvättmedel t.ex. fordonstvättmedel med vax.
6. Låt tvättmedlet verka någon minut.
7. Spola av stolen med högtrycksstråle eller vanlig vattenstråle beroende på smutsgrad. Spruta ej direkt mot lagringar och dräneringshål.
8. Kontrollera att stolen är ren.
9. Låt stolen torka i torkrum. Plocka bort de delar där vatten lätt samlas. Om stolen är tvättad i maskin rekommenderar vi att den även blåses av med tryckluft.
10. Kontrollera att stolen är torr, torka med trasa vid behov. Kontrollera även att samtliga märklappar är tydliga om inte, byt ut dem. (Tiltdekaler, märketiketter för transportfästpunkter o.dyl.)
11. Är stolen ej så smutsig kan man nöja sej med att spraya den med sprit och eftertorka med en trasa.
12. Rullstolen är nu klar att rekonditionera. Skriv din signatur att stolen är ren.

## **Dartex**

Ytlig smuts avlägsnas genom att torka med en mjuk trasa med vatten och rengöringsmedel. Vid svårare nedsmutsning och risk för smitta torkas först med sprit, sedan med varmt vatten och rengöringsmedel. Särskilda desinfektionsmedel kan användas om tillverkarens bruksanvisning efterföljs. Tvättas klädseln i maskin, tvätta vid 60 grader.

# Rekonditionering

Vi rekommenderar att alla rörliga delar smörjs med en torr teflonbaserad spray, t.ex. Viso 900-B5 om de kärvar eller gnisslar.

**Skrudar och muttrar:** Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är åtdragna.

**Chassi:** Samtliga delar skall kontrolleras med avseende på sprickbildning eller andra skador. Kontrollera speciellt i anslutning till svetsar. Upptäcks skador skall delen bytas ut helt.

**Klädsel:** Är klädseln trasig rekommenderar vi att den byts ut.

**Sits-/ryggvinkling:** Kontrollera funktionen genom att vinkla rygg och sits från ytterläge till ytterläge med hjälp av ryggreglagen. Fungerar inte tiltning och ryggvinkling börja med att justera vajern vid gaskolvfästet, om inte detta hjälper måste gasfjädern, bytas ut. Kontrollera även i ett mellanläge och att kolven låser korrekt. OBS: Gasfjädern får inte öppnas – den innehåller gas och olja under mycket högt tryck.

**Rygg:** Kontrollera att ryggen sitter ordentligt på, att vreden är åtdragna på ryggen.

**Körhandtagsbygel/Körbygel:** Kontrollera att körhandtagsbygeln/körbygeln är stabil vid höjdställning, att vredet fäster körhandtagen ordentligt, att gummit på handtaget är helt och att handtaget sitter fast. Om inte limma om. Vid fel bör de bytas ut av säkerhetsskäl. Kontrollera även att klistermärkena för tilt är hela annars byt ut dem.

**Armstöd:** Kontrollera att funktionerna fungerar, tag av och på armstödet, justera höjd- och djup av armstödsplattan. Är armstödsdynan trasig rekommenderar vi att den byts ut mot ny.

**Benstöd:** Kontrollera att funktionerna fungerar. Kontrollera vinklingen och låsningen. Tag av och på benstöden. Kontrollera höjdställning av fotplattan, höjd- och djupinställningen av vadplattan, vinklinsmöjligheten av fotplattan. Om vadplattan är trasig rekommenderar vi att den byts ut.

**Drivhjul:** Vi rekommenderar att däcken byts ut om mönstret är nedslitet. Saknas det ekrar eller om de är lösa, ersätt de saknade och spänn de lösa. Framförallt på massiva hjul finns risk att ekrarna blir lösa. Skruva fast drivringen om den är lös. Känn på drivringen att den är slät och inte några vassa kanter har uppkommit byt i så fall ut den. Kontrollera att hjulet är plant och inte skevt, justera det i så fall, alternativt byt ut. Kontrollera att drivhjulsaxeln är helt instucken i mutterstycket, så att de två låskulorna sticker ut bakom mutterstycket och låser axeln. Se till att det finns en skyddshatt på drivhjulsaxeln. Kontrollera lufttrycket i däcken. Rätt lufttryck finns angivet på däcken.

**Länkhjul:** Tag bort länkhjulet och gör rent länkhjulsgaffel och hjul från hår och annan smuts. Montera på länkhjulet och kontrollera att hjulet snurrar lätt både i rotation och svängning. Kontrollera att komplett hjul går lätt att ta av och sätta på. Är ”glappet” för stort kan lagret vara utslitet, vi rekommenderar då att lagret byts ut. Är länkhjulen luftpumpade kolla tryck och pumpa. Rätt lufttryck finns angivet på däcken, är länkhjulen massiva kolla sprickbildning och gör en bedömning om de behöver bytas ut.

**Blockbroms:** Kontrollera att bromstappen inte är nedsliten, om den är det bör tappen bytas ut av säkerhetsskäl. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. Provbromsa stolen med rätt lufttryck i däcken, då skall bromstappen i bromsat läge trycka ned däckets 5 mm.

**Vårdarmanövrerad broms:** Kontrollera att stolen bromsar, om den inte gör det kan vajern justeras på två ställen. Uppe vid handtaget och nere vid hjulnavet. Kontrollera även att det inte är något brott på vajerhöljet, om så är fallet byt ut det. Spänn vajern tills bra bromsverkan erhållits.

**Verktyg:** Kontrollera att insexnyckeln sitter på plats på ryggdynan.

# Tillbehör

Vi rekommenderar att alla rörliga delar smörjs med en torr teflonbaserad spray, t.ex. Viso 900-B5 om de kärvar eller gnisslar.

**Skruvar och muttrar:** Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är åtdragna.

**Huvud- och huvudstöd med käkstöd:** Kontrollera att sidledsjustering och vinkeljustering av "vingarna" fungerar. Kontrollera även att minnesfunktionen finns (efter 2005).

**Nackstöd:** Kontrollera att minnesfunktionen finns (efter 2005).

**Bålstöd Multifunktional från 2005:** Kontrollera att minnesfunktionen finns.

**Glidsits Rea Comfort:** Kontrollera att glidfunktionen fungerar och att stoppet under sitsen finns på plats.

**Bendelare:** Kontrollera att justeringen i djupled fungerar (före 2005).

**Verktyg:** Kontrollera att insexnyckeln sitter på plats på ryggdynan.

# CHECKLISTA

	OK	ANM	SIGN
<b>TVÄTT</b>			
<b>REKONDITIONERING:</b>			
Skruvar och muttrar			
Chassi			
Körhandtagsbygel			
Ryggklädsel			
Sittklädsel			
Rygg			
Ryggbygel			
Ryggvinkling			
Ryggfällning			
Komfortrygg			
Sits			
Parkeringsben			
Sidostöd/Armstöd			
Fotplattor			
Benstöd			
Tippskydd			
Tilt			
Gummihandtag			
Drivhjulsfäste			
Drivhjul			
Länkhjul			
Blockbroms			
Vinkelställbar länkhjulsupph.			
Vårdarmanövrerad broms			
Verktyg			
<b>PROVKÖRNING:</b>			
Stolen ska gå rakt			
Lätt att köra			
<b>LEVERANSKONTROLL:</b>			
Skicka med en manual			