

Rengöring av AQUATEC BADLYFTAR

VAD	HUR	NÄR	MED VAD
- Sits - Rygg - etc	Avkalkande rengöringsmedel Verkningstid: 15 till 30 min.	Vid rengöring i ultraljudsanläggning	Rengöringsbad Medel: Trical-Sanitetsrengöring Fabrikat: Schuster-Chemie Koncentration: 10%
- Sits - Rygg - etc	Avfettande rengöring Verkningstid: 15 - 25 min.	Efter avkalkning	Ultraljudsmedel: USR 2400 Fabrikat: Fa. Walter Koncentration: 7% Bytes: vid behov
- Sits - Rygg - etc	Desinfektion, verkningstid: 15 min.	Efter komplett rengöring	Rengöringsbad Medel: Incidin PLUS Fabrikat: Henkel-Ecolab AG Koncentration: 2%
- Drivanordning - Handkontroll - Laddare	Manuell rengöring Sprayas med desinfektionsmedel	Efter eventuell reparation	Rengöringsmedel Lixtop Desinfektionsrengörings-Medel: F 3000 Fabrikat: Dr. Becher GmbH Koncentration: 1%
- Sits - Rygg - etc	Renspolning med klart vatten	Efter desinfektion	Klart vatten
- Sits - Rygg - etc.	Torkning	Efter renspolningen	Tryckluft

OBS! Nämnda rengöringsmedel är produkter som används i Tyskland och kan därför heta något annat på svenska.