	Låseclips	Fjederknop	Albuestøtte klikksystem	Albuestøtte standard	Justerbar albuestøtte	Standard håndgreb	Soft håndgreb	Justerbart håndgreb	Refleks i håndgreb
Model									
ADVANTIK	x		x	x		x			x
ADVANTIK SOFT		x	x	x			x		x
ADVANTIK TALL	x		x	x		x			x
ERGO	x				x	x		x	
ERGO-SOFT	x				x		x		

Tekniske specifikationer

Produkt	Rør	Albuestøtte
Albuestok	Anodiseret aluminium legering	Modifieret polyamid PA6

Produkt	Håndgreb højde fra/til	Albuestøtte Højde fra/til	Rør dia.	Max. brugervægt
ADVANTIK	75 - 98 cm	24 cm	19 mm	130 kg
ADVANTIK SOFT	75 - 98 cm	24 cm	19 mm	130 kg
ADVANTIK TALL	85 - 108 cm	24 cm	19 mm	130 kg
ERGO	75 - 98 cm	24 - 26,5 cm	19 mm	120 kg
ERGO-SOFT	75- 98 cm	24 - 26,5 cm	19 mm	120 kg

Reserve dele	
DUPSKO 19 mm	Med metal indlæg
ISDUPSKO	Med metal indlæg
LÅSECLIPS	

Genbrug af albuestokkene

Produktansvaret gælder kun ved den første anvendelse af produkterne i denne vejledning. Hvis et produkt er brugt tidligere, bør det kontrolleres for slid eller skader af et hjælpemiddeldepot. Denne gennemgang skal udelukke en eventuel uretmæssig brug forårsaget af indlysende eller usynlige skader.

Produktets forventede levetid

Den forventede levetid for produkterne i denne vejledning, såfremt de anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelsesmellemlum og almindelig pleje er 2 år. Ud over denne periode, bør produktet kun anvendes med omhu. Eftersyn bør foretages mindst hvert halve år. Ved særlig hård brug af produktet bør produktet efterses med kortere mellemlum.

Garanti

De produkter, der er omtalt i denne vejledning, er forsynet med en garanti på 2 år. Sliddele og erstatning af de produkter, som har følger af forkert brug er udelukket.

Brugermanual



Albuestokke



Til dagligt brug

Albuestokkene er udviklet til brugere med nedsat evne til at gå sikkert omkring og giver en mere stabil gang. Albuestokkene er velegnet indendørs såvel som udendørs.

Læs nedenstående sikkerhedsreglerne inden brug!

Lad din terapeut rådgive dig vedrørende tilpasning af og hensigtsmæssig gang med albuestokke.

INVACARE A/S

Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby
 Tel: (45) (0)36 90 00 00
 Fax: (45) (0)36 90 00 01
<http://www.invacare.dk>
 E-mail: denmark@invacare.com


REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
 Telephone: +49-(0)5431/9416-0
 Telefax: +49-(0)5431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
 E-mail: info@rebotec.de

Før albuestokken tages i brug:


Justering af højden

Justering af højden på albuestokken foretages med et låsegreb på teleskoprøret, en fjederknop eller med en låseclips.

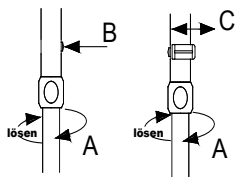

- Låsegrebet løsnes (A) ved at dreje det mod venstre.
- Tryk fjederknappen ind (B) i hullet, eller træk låseclipsen ud (C).
- Indstil aluminiumsdelene af stokken til den ønskede højde.
- Lad fjederknappen klikke i hul, eller klik låseclipsen på plads.
- Ved et låsegreb strammes grebet let (A) ved at dreje mod højre (grebet skal strammes for at undgå støj fra stokken ved gang)

Justering af albuestøtte (på de modeller, der har indstillelig albuestøtte)

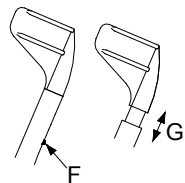


- Tryk fjederknappen ind (F) i hullet.
- Indstil albuestøtten (G) til den ønskede højde.
- Lad fjederknappen (F) klikke tilbage i et hul.

Opbevaring af albuestokkene (gælder Advantik, Advantik Soft og Advantik Tall)



- Hjørnet af den ene albuestøtte føres ind i det lange hul på den anden albuestøtte.
- Denne enkle funktion letter opbevaring.
- Hindrer stokkene i at falde på gulvet.


Justering af håndgreb (på de modeller med indstillelig håndgreb)

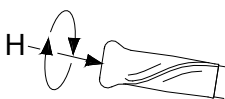

- Unbracoskruen for enden af grebet løsnes (H) med en 6 unbraconøgle.
- Drej grebet til den ønskede position.
- Stram unbracoskruen igen (H).

Udskiftning af dupsko

En slidt eller beskadiget dupsko bør udskiftes. Træk dupskoen af stokerøret (E). Skub en ny dupsko på. Vær opmærksom på at bruge den rigtige størrelse og design (Se tekniske specifikationer) - kontroller om dupskoen sidder rigtigt fast.

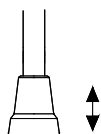

- ⚠ **Advarsel!** Der skal altid være en intakt metalplade inde i dupskoen. Metalpladen forhindrer stokerøret går igennem dupskoens gummi, hvilket kan forårsage skade på gulv/underlag eller at stokken ikke står fast.

Daglig vedligeholdelse

Alle plastdele kan let rengøres med et mildt almindeligt tilgængeligt rengøringsmiddel. Overhold brugsanvisningen, der fremgår af rengøringsmidlet. Aluminiumsrøret vaskes med en fugtig ren klud og tørres herefter med en tør klud.

OBS Brug ikke opløsningsmidler eller fedtet sæbe!

Albuestokken bør efterses for skader før brug. Sørg for at fjederknappen eller låseclipsen og dupskoen er korrekt monteret og strammet. I tilfælde af skader bør din albuestok straks repareres. Af sikkerhedsmæssige årsager bør kun originale reservedele anvendes. Kontakt dit depot for alle reparationer.

Utilstrækkelig vedligeholdelse fører til begrænsninger eller annullering af producentens produktansvar.

Få dine albuestokke kontrolleret af hjælpemiddeldepotet én gang om året eller efter affale.

Sikkerhedsinstruktion

Den maksimalt tilladte brugervægt for albuestokken bør ikke overskrides!

Før brug efterses albuestokken omhyggeligt for skader. Hvis skaden er opdaget, så bør du ikke bruge albuestokken!

For din egen sikkerheds skyld lad en hjælper støtte dig ved store forhindringer, så at vedkommende kan hjælpe dig i tilfælde af fald

Når du går på trappe bør du altid holde én hånd på gelænderet og den anden på albuestokken. I tilfælde af et fald: Lad albuestokken falde ud til siden, så du ikke kommer til skade ved at lande på stokken!



RISIKO for udskridning

- Undersøg regelmæssigt dupskoen for slid eller skader.
- Når du går med albuestokken, bør stokken placeres så vinkelret på gulv eller fortov som muligt. Placer ikke albuestokken for langt væk fra din krop.
- Anvend kun albuestokken for at støtte din gang.
- Albuestokken må aldrig anvendes til andre formål end hensigten (fx ikke til at rejse dig op, som en løftestang, eller til at flytte møbler med).
- Mekaniske ændringer er ikke tilladt - fører til annullering af produktansvar!
- Du må ikke hænge nogen genstande på albuestokken under gang (fx punge og tasker)
- Lad ikke albuestokkene blive udsat for sollys i længere perioder (fx i nærheden af vinduer, bilruder eller varmeapparater).
- Hvis albuestokken ikke benyttes i en længere periode, bør den efterses for skader før den anvendes igen.
- Brug aldrig albuestokken på sne eller isede overflader uden først at montere en isdupsko.
- Vær forsigtig når du går på fugtige og våde fliser, overflader eller ved passage ved løse tæpper.