



« La première prévention de l'escarre au lit consiste à changer les points d'appui du corps sur le matelas en moyenne toutes les 3 heures pour limiter la compression trop prolongée des vaisseaux en regard des saillies osseuses et pour permettre l'irrigation des tissus. »

Poids patient max. = 245 kg

## Manuel d'utilisation

- Retirer tous les éléments d'emballage avant l'utilisation.
- Placer le matelas Softform® directement sur le lit.
- Le linge de lit ne doit pas être bordé serré
- Afin de simplifier le stockage et la manutention, le matelas Softform® est enroulé ou serré.

Bien que cela n'affecte en rien l'efficacité ou la durée de vie du produit, il est recommandé de dérouler le produit au plus tard 21 jours après réception. Après avoir déroulé le matelas pour la première fois, attendre au moins 1 heure avant de l'utiliser (en fonction de la température ambiante), pour permettre au produit de revenir à son état normal en vue d'une efficacité optimale

- La housse Dartex® est résistante à l'eau, bi-extensible, afin d'assurer le confort du patient et d'optimiser l'efficacité de la mousse.
- A l'exception des draps, éviter, autant que possible, l'utilisation de housses ou de rembourrages additionnels entre le patient et le matelas. Cela pourrait réduire l'efficacité du produit.
- La mousse doit être contrôlée périodiquement. Si la housse a été endommagée, le produit ne devrait pas être utilisé jusqu'à la mise en place d'une nouvelle housse.
- Pour des raisons d'hygiène, réservé l'usage à une seule personne.

## Description du produit

Les matelas Invacare® SoftForm® offre des caractéristiques exceptionnelles réduisant la pression. Grâce à une bonne répartition des pressions et du fait des matériaux utilisés de haute qualité qui assure une bonne immersion du patient, ces matelas apportent une aide en terme de prévention contre les escarres.

Si vous désirez des informations supplémentaires au sujet des matelas SoftForm® veuillez téléphoner au service commercial de Invacare® au +33 (0)2 47 62 64 66.

### Repositionnement

Il est essentiel pour le patient de changer de position ou d'être repositionné régulièrement. Cela allège la pression au niveau des zones à risque du fait de l'augmentation des points de pression et apporte une aide à la prévention contre les escarres.

### Nettoyage et entretien

La housse peut être nettoyée SOIT avec une solution de détergent neutre et d'eau chaude à l'aide d'un tissu jetable, SOIT être lavée en machine à 71°C.

Ne pas utiliser des produits de nettoyage contenant du phénol ou de l'alcool.

La housse doit être séchée minutieusement sur un fil avant d'être replacée sur le coussin. Ne pas sécher dans un sèche-linge. En cas de salissure importante, la housse doit être lavée en machine à 71°C avec une solution de détergent dilué.

### Qualité et résistance aux feux

Dans notre société la qualité est prioritaire. Nous travaillons conformément aux normes ISO 9001:2000 et ISO 13485:2003. Tous les produits MSS portent la marque CE conformément à la Directive relative aux appareils médicaux.

Les matelas Invacare® SoftForm® sont soumis à des essais indépendants et certifiées conformément à la norme BS5852:1990 (réglementations feux). La housse est testée conformément à la norme feu BS7175:1989.

### Conditions stockage

Température : 5°C - 28°C

Humidité : 60%



**Yes, you can.®**

Fabriqué par Medical Support Systems Ltd.

MSS House, Taffs Fall Road, Treforest Industrial Estate, Cardiff, UK, CF37 5TT

Tél. : +44 (0) 1443 849 200 Fax : +44 (0) 1443 843 377

Email : sales@medsys.co.uk Web : www.medsys.co.uk



Compte tenu de notre politique d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier le design sans préavis. Softform® est une marque déposée de Medical Support Systems Ltd.

L002032 -B