

# Jazz 510/610 enhandsbroms

sv **Gånghjälpmedel**  
Servicemanual

## I Generellt

sv

### I.1 Om manualen

Den här bruksanvisningen tillhör ett Invacare-tillbehör och innehåller viktig information om hantering och montering. Läs bruksanvisningen för produkten noggrant och följ säkerhetsanvisningarna så säkerställer du att produkten används på ett säkert sätt.

### Symboler som används i manualen

I den här bruksanvisningen markeras varningar med symboler. Varningssymbolerna åtföljs av en rubrik som anger allvarlighetsnivån.



#### VARNING

Anger en riskfylld situation som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.



#### FÖRSIKTIGT

Anger en riskfylld situation som kan leda till lättare skada om den inte undviks.



#### VIKTIGT

Anger en riskfylld situation som kan leda till produktskada om den inte undviks.



#### Tips och rekommendationer

Ger användbara råd, rekommendationer och information för en effektiv och problemfri användning.



Information om vilka verktyg som behövs.

### I.2 Allmänna varningar



#### FÖRSIKTIGT!


##### Dålig bromsverkan

Felaktig justering av höjden på handtagen kan göra att bromsarna inte fungerar.

- Kontrollera alltid bromsarnas funktion efter att handtagens höjd har justerats och innan du använder rollatorn.
- Justera handtagen till rätt höjd vid behov.

## 2 Montering

### 2.1 Ta bort bromsarna

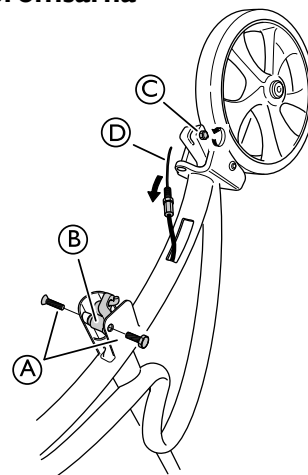


ÅTERFÖRSÄLJARE: Behåll den här manualen.  
Procedurerna i den här manualen får ENDAST utföras av en kvalificerad tekniker.




Yes, you can.®


1. Lossa och ta bort skruvarna och hylsmuttern **A** samt plastbussningen **B** för vajerhållaren.

 insexnyckel 4 mm + 10 mm fast nyckel


2. Lossa skruven för bromsplattan **C**.

 insexnyckel 3 mm


3. Lossa vajern **D** från bromsplattan.

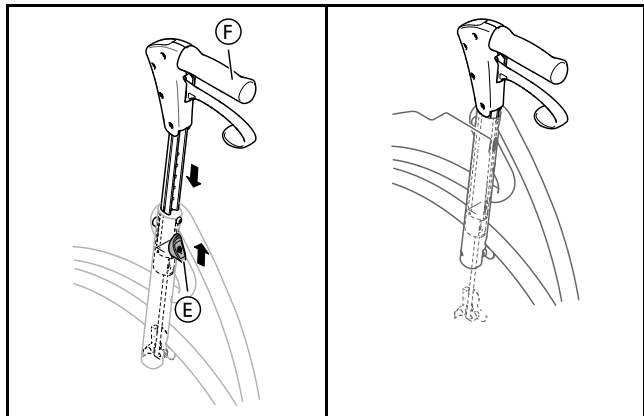


4. Tryck höjjusteringsknappen **E** uppåt.
5. Sänk handtaget **F** till den lägsta positionen så att du enkelt kan komma åt vajerhållaren och bromsstången.

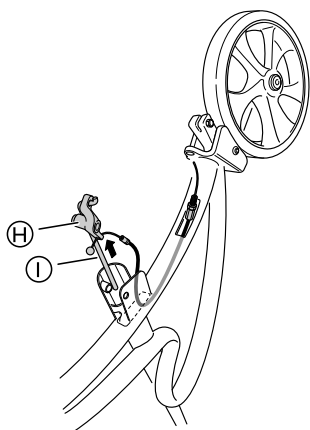

6. Ta bort vajerhållaren **H** och bromsstången **I**.

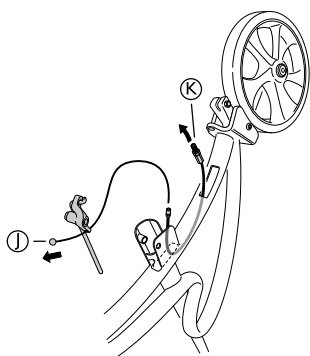

7. Ta bort den befintliga vajern **J** från vajerskyddet.
8. Ta bort det tomma vajerskyddet **K**.

 fast nyckel 10 mm

9. Upprepa samma sak på andra sidan.

## 2.2 Montera enhandsbromsen




### WARNING!

#### Bromssystemet fungerar inte


Om bromssystemet monteras på fel sätt kanske det inte fungerar korrekt.

- Kontrollera att bromssystemet fungerar som det ska efter monteringen.
- Se avsnittet "Justera bromsverkan" för mer information.

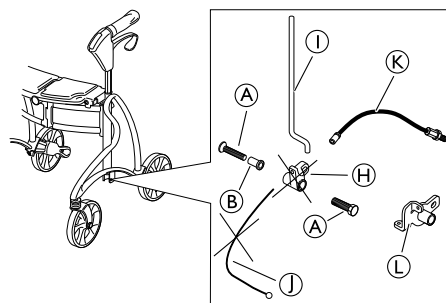


1. Ta bort och behåll eller kassera delarna enligt tabellen nedan.


<b>A</b>	Skruv och hylsmutter (behåll)
<b>B</b>	Plastbussning (behåll)
<b>H</b>	Befintlig vajerhållare (kassera och använd den nya vajerhållaren <b>L</b> som levereras med enhandsbromspaketet)
<b>J</b>	Befintlig vajer (kassera)
<b>I</b>	Bromsstång (behåll)
<b>K</b>	Vajerskydd (behåll)
<b>L</b>	Ny vajerhållare (levereras med enhandsbromspaketet)

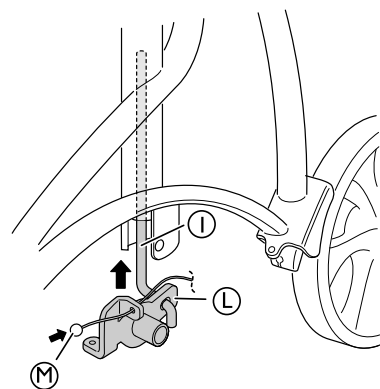


2. Montera den nya vajern **M** i den nya vajerhållaren **L**.
3. Montera vajerhållaren **L** på bromsstången **I**.
4. Montera vajerhållaren med vajern i ramen.

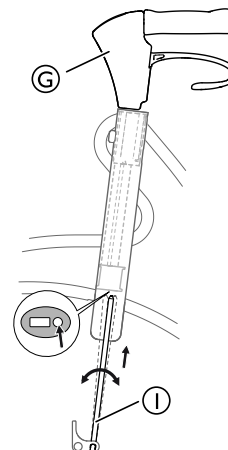


5. För in bromsstängan ① i handtagets sidorör ②.


 Vicka lite på bromsstängan så blir det lättare att passa in den i det runda hålet i fästet.

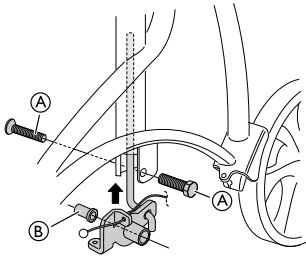

6. Sätt tillbaka skruven, hylsmuttern ① och plastbussningen ②.

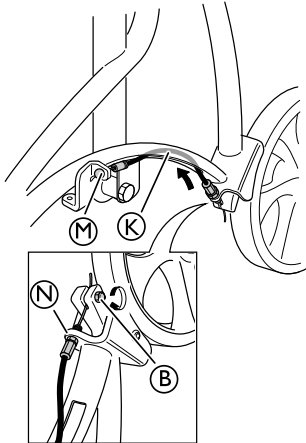

7. Dra det korta vajerskyddet ③ genom ramen från bakgaffeln till fronten.  
 8. Dra den nya vajern ④ genom vajerskyddet ③.  
 9. Montera vajerskyddet på ramen ⑤.


 fast nyckel 8 mm + 10 mm

10. Montera vajern ⑥ på bromsplattan.


**!** **Dålig bromsverkan**  
 – Se till att bromsplattan sitter nära sin slutposition (2–3 mm från hjulet). Justeringskruven ska gå att justera åt båda hållen.  
 – Se avsnittet ”Justera bromsverkan” för mer information.

11. Dra åt skruven ⑦


 insexnyckel 3 mm

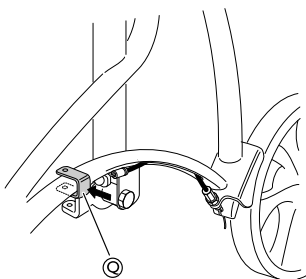

12. Montera fästet ⑧ för vajern på motsatt sida på ramen.

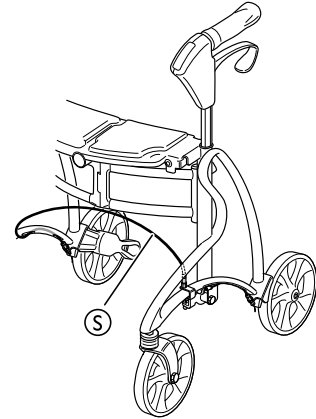


13. Dra det korta vajerskyddet ⑤ genom ramen på motsatt sida från bakgaffeln till framsidan.

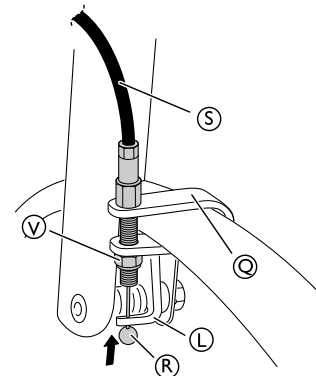

14. Dra vajern för motsatt sida ⑧ genom det första fästet ⑧.  
 15. Dra fästmuttern ⑨ över vajern ⑧.  
 16. Dra vajern genom det andra fästet ⑩.  
 17. Dra vajern ⑧ genom vajerskyddet ⑤.  
 18. Fäst vajern och vajerskyddet på fästena genom att dra åt fästmuttern ⑨.


 fast nyckel 8 mm + 10 mm

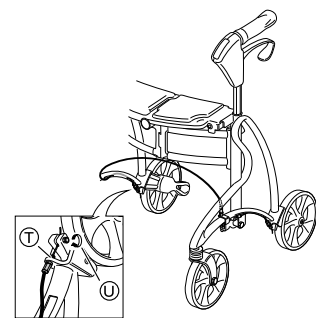


19. Montera vajerskyddet med vajern mot ramen ①.

 fast nyckel 8 mm + 10 mm


20. Montera vajerns ände på bromsplattan.  
 21. Dra åt skruven ⑩.

 insexnyckel 3 mm


### 2.3 Montera det icke-funktionella handtaget

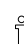
 Enhandsbromsen kan kombineras med ett icke-funktionellt handtag eller med hemplegihandtaget. Se anvisningarna för hemplegihandtaget för mer information.

1.

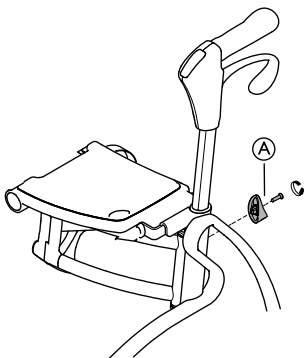


Lossa skruven och ta bort höjjusteringsknappen (A).


 insexnyckel 2,5 mm

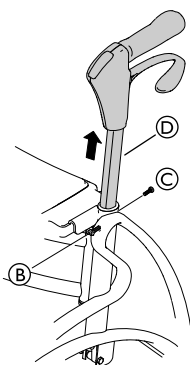


2. Lossa justeringsskruven (B).

 insexnyckel 3 mm

3. Lossa och ta bort fästskruven för handtaget (C).

 insexnyckel 4 mm


4. Ta bort det befintliga handtaget (D).

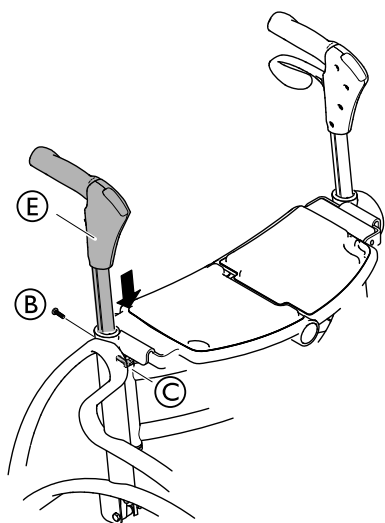

5. Montera det icke-funktionella handtaget (E).

6. Sätt tillbaka fästskruven (C) och dra åt.

7. Dra åt justeringsskruven (B).

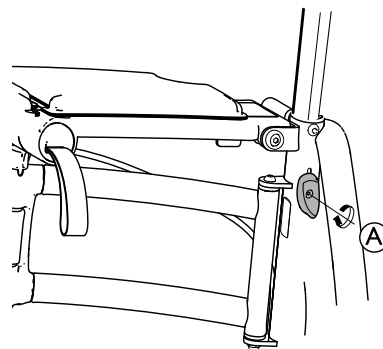

8. Sätt tillbaka höjjusteringsknappen (A).

9. Dra åt skruven.

## 2.4 Justera bromsverkan




### **WARNING!**

#### **Risk för personskador**

Dålig bromsverkan

– Justera alltid bromsverkan efter att ha monterat eller justerat bromssystemet.

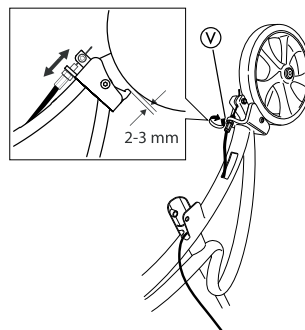

1. Reglera bromsverkan med hjälp av justeringsmuttern (V).



Avståndet mellan bromsplattan och hjulet ska vara 2–3 mm.



fast nyckel 8 mm + 10 mm







## Säljbolag

### Sverige:

Invacare AB

Fagerstagatan 9

S-163 91 Spånga

Tel: (46) (0)8 761 70 90

Fax: (46) (0)8 761 81 08

sweden@invacare.com

www.invacare.se



Tillverkare:

Invacare Rea AB

Växjövägen 303

S-343 75 Diö

1586537-A 2016-02-22



**Making Life's Experiences Possible™**

  
**DOLOMITE**

  
**Yes, you can.®**