

Kortfattet vejledning for SoftCloud™ Ace



Yes, you can.®

Kom godt i gang:

1. Rul madrassen ud og placer den i sengen
2. Placér pumpen på sengens gavl i benenden
3. Benyt kabelfæsterne langs siden af madrassen og tilslut elkabel
4. Sæt slangen fra madrassen i pumpen – hørbart klik
5. Lyn betrækket op i hovedenden og tjek at CPR-ventilen slutter helt til.

Brug af betjeningspanelet:

A) Tænd/sluk-knap

Tænder og slukker for systemet. Hold knappen nede i 3-5 sek. Madrassen fyldes på ca. 30 min. Akustisk signal lyder, når kan borgeren lægges på madrassen. Efter 10-15 sek. har systemet automatisk målt borgerens vægt og indstillet trykket i madrassen korrekt.

B) Lås/Lås op-knap samt børnesikring

Holdes inde i 5 sek. for at låse/låse op for pumpens indstillinger – efter akustisk signal er systemet låst/låst op.

C) "Alarm Mute"-knap og indikator for opstartsfejl

Tryk på knappen slår den hørbare alarm fra. Alarmen genoptages efter ca. 20 min. LED-indikator lyser permanent ved opstartsfejl.

D) Plejefunktion / Knap til maks. tryk

Holdes inde i 3 sek. for oppustning til maks. tryk mhp. pleje og forflytning. For at deaktivere det maksimale tryk, trykkes igen i 3 sek. Deaktiveres maks. tryk ikke, vender systemet automatisk tilbage til den foregående indstilling efter 30 min.

E) Valg mellem vekseltryk eller statisk tryk

Tryk for at vælge vekseltilstand (cellerne skiftevis oppustes og tømmes) eller statisktilstand (cellerne forbliver luftfyldte). Statisk indstilling kan fx vælges til terminale borgere eller borgere med mange smerter. OBS! Frekvensen af repositionering skal øges ved anvendelse af statisk tilstand.

F) Indikator for fejl i vekseltrykstilstand

LED-indikator lyser og der udsendes en akustisk alarm for at advare om fejl i vekseltryksfunktionen.

G) Indikator for lavt tryk

LED-indikator lyser og der udsendes en akustisk alarm for at advare om, at trykket i madrassen er for lavt.

H) Indikator for service

LED-indikator lyser og der udsendes en akustisk alarm for at meddele at pumpen har behov for service

I) Indikator for strømsvigt

LED-indikator lyser og der udsendes en akustisk alarm for at meddele at pumpen mangler strøm

J) Indstilling af komfort (borgerens oplevelse af hård/blød)

Benyt piletasterne (+/-) til at justere trykket til et komfortabelt niveau for borgeren. Vent 20-25 min. og undersøg om borgeren er komfortabel og kontroller at borgeren ikke ligger igennem madrassen ved en hver justering af trykket.

K) Indikator for automatisk vægtregistrering

Funktionen for automatisk tilstand bruges, når madrassen overgives til en ny bruger. Systemet starter ud fra en trykreferenceværdi ved beregning af den individuelle trykindstillingen.

L) Advarselsindikator

Angiver en alarm/advarsel for produktet.


Kontrol af korrekt trykniveau:

Før hånden langs madrasbunde ind under borgerens sæde og under en celle der ikke er oppustet - Borgerens sædeparti må ikke kunne mærkes!

Hæl zone:



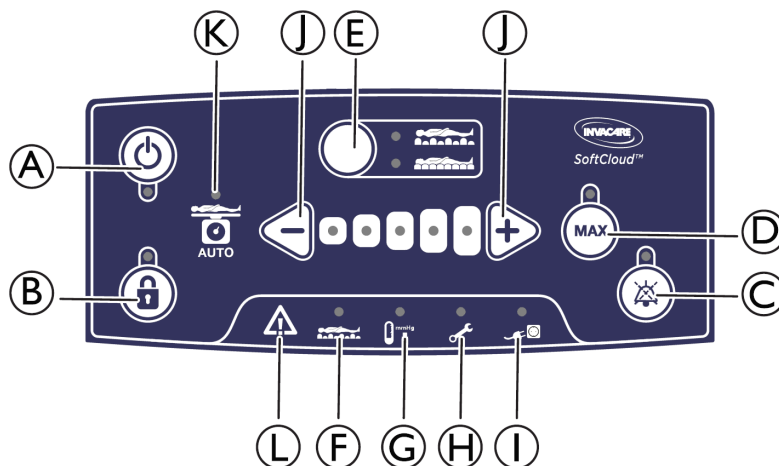


Madrassen er udstyret med 5 smalle hælceller, der øger redistribueringen af trykket for denne udsatte zone.

Følg altid vejledningen i brugermanualens anvisninger - Hvis der fjernes celler under hælene skal frekvensen af observationen for dette område øges.



Fejlfinding og afhjælpning af fejl:

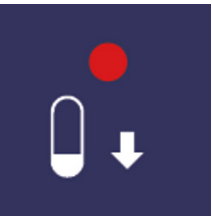SoftCloud™ systemet har fire forskellige hørbare advarselssignaler og en indikator for service, der kan kendes på de fem forskellige symboler. Symbolerne er vist nedenfor sammen med grundlæggende fejlfindingsupport.

Advarsel/fejl	Årsag	Løsning
 LED-indikator	Fejl ved opstart ("Alarm mute"-knap)	<ol style="list-style-type: none">1. Nulstil advarslen – sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm mute".2. Kontrollér at håndtaget sidder sikkert i pumpen. Kontrollér at CPR strop er sat korrekt fast/ikke lækker.3. Kontrollér at alle luftslinger på indersiden af madrassen sidder godt fast.4. Kontrollér alle celler, rør og slanger for luftlækage.5. Kontrollér at luftfilter er placeret korrekt og at det er rent.6. Tænd for strømmen.
 LED-indikator + akustisk alarm	Fejl i vekseltrykstilstand (ingen vekslen)	<ol style="list-style-type: none">1. Nulstil advarslen – sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm mute".2. Frakobl luftslingerne for at reducere trykket – tilslut dem igen, når trykket er faldet.3. Genstart systemet på tænd/sluk-knappen. Systemet starter automatisk i statisk tilstand og skifter til vekseltilstand, når driftstrykket er nået.4. Nulstil de personlige indstillinger.
 LED-indikator + akustisk alarm	Trykket er for lavt	<ol style="list-style-type: none">1. Nulstil advarslen – sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm mute".2. Kontrollér at håndtaget sidder sikkert i pumpen. Kontrollér at CPR strop er sat korrekt fast/ikke lækker.3. Kontrollér at alle luftslinger på indersiden af madrassen sidder godt fast.4. Kontrollér alle celler, rør og slanger for luftlækage.5. Kontrollér at luftfilter er placeret korrekt og at det er rent.6. Tænd for strømmen.
 LED-indikator	Behov for service	<ol style="list-style-type: none">1. Nulstil advarslen – sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm mute".2. Kontakt Invacare mhp. service. Der er ingen risiko mht. fortsat brug, heller ikke selvom LED-indikatoren lyser.
 LED-indikator + akustisk alarm	Strømsvigt	<ol style="list-style-type: none">1. Nulstil advarslen – sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm mute".2. Kontrollér at strømkablet sidder sikkert i stikkontakten og pumpen, og kontrollér, at der er tændt for strømmen.3. Kontrollér kontrolenhedens sikring (1 AMP) Sikringen kan løsnes ved at presse en skruetrækker ind og dreje den.

Bemærk! **SoftCloud™** filteret skal skiftes én gang årligt samt når pumpen skal placeres hos ny borger.



For yderligere information om betjening, fejlfinding mv af **SoftCloud Ace** madrasserne, se venligst brugermanualen. Brugermanual samt øvrig dokumentation kan frit downloades på www.invacare.dk



Yes, you can.®