



Yes, you can.

## 2.1 Alternerende tryk

Den alternerende del af **Softform Premier Active 2 RX** veksler henover 10-12 min efter princippet 1 op og 1 ned = hver anden.

Den alternerende del af **Softform Premier Active 2 RX** kan pustes op mens borgeren ligger på madrassen.

## 2.2 Alarmer

Pumpen sender en audio-visuelt alarm i tilfælde af lavt tryk eller strømsvigt.

For lavt tryk    Mangler strøm    Behov for service    Pumpe OK    Afbryd alarm



## 3. Afmontering af pumpe

### 3.1 Midlertidig afmontering af pumpe

Hvis man midlertidigt ønsker at fravælge den alternerende funktion, slukkes på on/off knappen på siden af pumpen. Pumpen kan evt. blive hængende til den skal anvendes igen.

### 3.2 Længerevarende afmontering af pumpe

Hvis pumpen ikke skal anvendes indenfor den nærmeste fremtid:

- 1 Sluk for on/off knappen på siden af pumpen.
- 2 Fjern strømkablet fra el-udtag.
- 3 Fjern el-kablet fra pumpen.
- 4 Fjern luftslangen fra pumpen ved at trykke de 2 knapper, ved luftslangens tilslutning, ind – dette frigør slangen fra pumpen.  
**OBS: Slangen må ikke hives fra pumpen ved brug af vold !**
- 5 Luftslangen fastgøres til madrassens benende ved hjælp af trykknapperne.
- 6 Opbevar pumpe samt el-kabel forsvarligt.

# Quick betjeningsvejledning for **Softform® Premier Active 2 RX**

## 1. Ibrugtagning

1.1 Placer madrassen direkte på plejesengens liggeflade med teksten opad, og således at affegningen af fødderne er i benenden.

1.2 Pumpen hænges på sengens gavli i benenden.

1.3 Luftslangen løsnes fra madrassens ende og monteres i pumpen.

► Der lyder et klik som tegn på at slangen er korrekt monteret

1.4 Sæt strømkablet i pumpen og tilslut kablet til en stikkontakt – tænd for pumpen.

► Et enkelt svagt bip lyder

► Grøn LED-indikator blinker, mens systemet klargøres

► Konstant grøn LED angiver normal drift.



## 2. Funktion

**Softform Premier Active 2 RX** er særdeles velegnet til borgere med høj risiko for at udvikle tryksår eller/og som supplement til behandling af tryksår.

**Softform Premier Active 2 RX** er en hybridmadras, som består af alternerende celler indlagt imellem et lag profileret høj kvalitetsskum med "glide" effekt og ventilationskanaler og et lag kant-stabiliserende kvalitetsskum. Dette optimerer redistribueringen af tryk og reducerer shear samtidig med forbedret mikroklimahåndtering. Risikovurderingen af den enkelte borger kan ændre sig fra dag til dag og vare i kortere eller længere tid, således er en madras med indbygget mulighed for at ændre formål en optimal løsning.

**Softform Premier Active 2 RX** kan anvendes med eller uden aktivering af vekselrykket. Når **RX** pumpen tilsættes "steppes" redistribueringen af trykket op, således at madrassen kan tilbydes til ekstra højrisiko borgere. **RX** pumpen indstiller automatisk trykket i madrassen i henhold til den enkelte borgers vægt og position på madrassen.

**Softform Premier Active 2 RX** er et fortrinligt supplement til behandling af tryksår i alle kategorier.

Yderligere information om problemløsning og betjening af **Invacare Softform Premier Active 2 RX** madrassen, se venligst brugermanualen. Brugermanual samt øvrig dokumentation kan frit downloades på Invacares hjemmeside [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)



Yes, you can.