



**Comoda Mod. VC 010**

Cod. 90100050



Prodotto Conforme **CE**

# MANUALE D'USO

VAIMAS SRL

Via Volpato, 39  
36035 Marano Vicentino VI

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =

Direttiva 93/42 CEE  
Ausili Medici Classe I

Rev. 1,2

## INFORMAZIONI GENERALI




La sedia da comodo è stata progettata e realizzata per il trasporto di pazienti in ambienti domestici o comunitari. Con l'aiuto di un assistente, il paziente può così spostarsi con facilità. La comoda può essere usata come WC o essere inserita direttamente sul WC domestico.

## DATI TECNICI

La sedia da comodo si compone essenzialmente di:

1. Telaio in acciaio cromato
2. Schienale imbottito con gommapiuma indeformabile da 3 cm
3. Sedile imbottito con gommapiuma indeformabile da 5 cm
4. Tappezzeria in skay IGNIFUGO classe 1 IM
5. Dispositivo WC con bacinella in PVC su binario in plastica
6. Braccioli imbottiti e fiancate estraibili
7. Pedane indipendenti regolabili in altezza



Dimensioni (in cm) – Pesi e portate (in Kg)

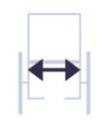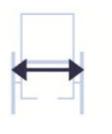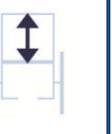									
52	43	55	45	83	101	52	21	14	90

## MONTAGGIO

Per il montaggio della sedia da comodo non servono attrezzi, basta seguire le istruzioni ed eseguire le regolazioni di seguito indicate:

- Estrarre dall'imballo in cartone la sedia da comodo completa.
- Rimuovere eventualmente lo scotch dalle ruote e dalla bacinella W.C.
- Assemblare i braccioli come da figure 1 e 2.

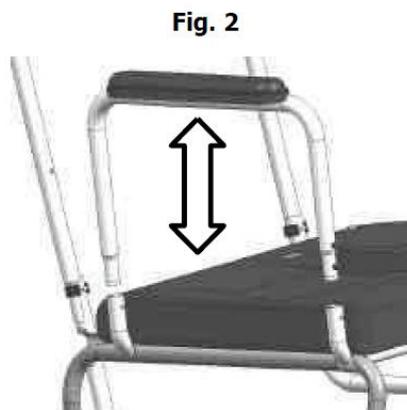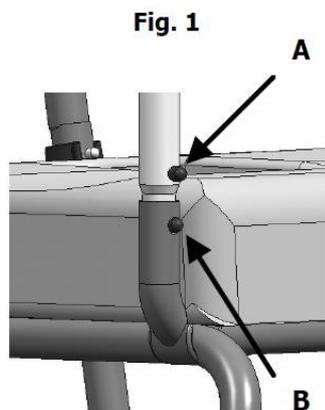


## BRACCIOLI ESTRAIBILI

I braccioli vanno assemblati come segue: far rientrare il piolo di comando A e poi infilarle negli appositi alloggiamenti prestando la massima cura all'avvenuto aggancio del piolo di presa B (fig. 1).

## PEDANE

Allentare il morsetto (Fig. 3 - A) che fissa il porta pedana alla gamba della sedia (si trova all'interno della vaschetta W.C.). Ruotare verso l'interno il porta pedana (Fig. 3 - B) fino a portarlo nell'asse ideale gamba anteriore gamba posteriore.

Serrare il morsetto fino a bloccare con sicurezza il porta pedana alla gamba della sedia. Abbassare le pedane poggia piedi fino ad incastrare l'incavo della pedana in plastica con il tubetto posto perpendicolarmente al porta pedana. La pedana si deve trovare così in posizione orizzontale. Regolare l'altezza della pedana nella posizione desiderata.

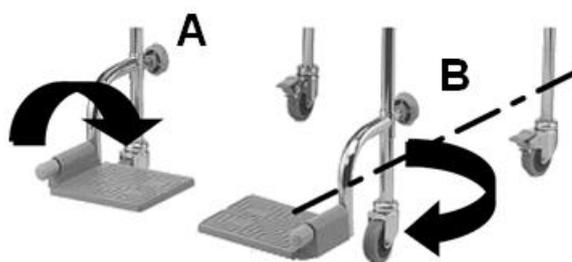

**Fig. 3**

## PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE CHE:

- Le pedane siano posizionate correttamente e ben fissate
- Lo schienale sia correttamente posizionato e fissato
- Il tappo e la bacinella siano inseriti
- I freni funzionino
- Le ruote scorrano e piroettino correttamente

- Il paziente, qualora le sue capacità non siano tali da garantire un sicuro utilizzo della sedia da comodo, per sedersi o alzarsi deve essere sempre assistito.
- Per agevolare la seduta e l'alzata dell'utilizzatore, sollevare le pedane in plastica facendole ruotare verso l'alto.
- In fase di seduta od alzata, BLOCCARE con il freno le ruote posteriori agendo con il piede sulla leva in plastica posta nella parte superiore della ruota. Qualora il paziente necessiti di assistenza, l'assistente, durante la fase di seduta, dovrà tenere ferma la sedia con le mani ponendosi nella parte posteriore.
- Durante la fase di seduta e alzata NON appoggiare i piedi sulle pedane in plastica onde evitarne il danneggiamento e/o lo sbilanciamento della sedia stessa.
- Fate sedere correttamente il paziente sulla comoda, per questo deve avere la schiena ben appoggiata allo schienale della comoda, il bacino appoggiato al fondo del sedile, le gambe appoggiate bene sul sedile e le ginocchia non devono essere troppo alte o troppo basse rispetto al sedile, ciò consentirà una corretta circolazione del sangue sugli arti inferiori.
- Durante la fase di trasporto il paziente deve tenere appoggiati i piedi sulle pedane in plastica e mantenere una corretta seduta.
- Per spostarsi sbloccare le ruote posteriori e spingere la comoda agendo sul maniglione posteriore dello schienale.
- Per spostarsi lateralmente, quindi per salire o scendere, togliere un bracciolo afferrandolo con una mano nella parte superiore compresa la parte metallica, premere il piolo e sfilare verso l'alto. Per rimetterlo innestare il bracciolo fino a far scattare la molla a piolo.
- Per l'utilizzo del WC, FRENARE la comoda, rimuovere il tappo, appoggiando una mano sul sedile ed afferrando l'asola del tappo asportabile e tirare verso l'alto. Per rimuovere la bacinella WC dalla posizione posteriore od anteriore estrarre la bacinella afferrandola per l'impugnatura.

## CONTROLLI

<b>Settimanali</b>	Controllare lo stato delle gomme e l'usura, il funzionamento dei freni, la pulizia delle tappezzerie e della bacinella WC, la regolazione delle pedane.
<b>Mensili</b>	Controllare il gioco delle ruote piroettanti, l'innesto dei braccioli, il fissaggio delle pedane, il fissaggio delle tappezzerie e dei braccioli imbottiti.
<b>Annuale</b>	Si raccomanda una revisione completa in un'officina autorizzata

## PULIZIA

Pulire completamente la sedia settimanalmente con prodotti detergenti, non aggressivi.

Pulire immediatamente dopo ogni utilizzo come WC la bacinella ed il sedile.

## ASSISTENZA

Nel caso che qualche componente, fuori dall'ordinaria manutenzione, si dovesse deteriorare, rivolgetevi al Vostro distributore. Il personale sarà a Vostra disposizione per qualsiasi problema si dovesse presentare, consigliandovi la soluzione più opportuna.

## RICAMBI

<b>N.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	320370	Tappo para colpo grigio
2	670100	Bracciolo imbottito skay blu
3	320450	Pedana in plastica grigia
4	320550	Bacinella WC in plastica grigia
5	373250	Ruota Ø 100 senza freno
6	373430	Ruota Ø 100 con freno
7	670350	Schienale imbottito
8	670300	Sedile (specificare tipo)



---

## ACCESSORI

---

La sedia deve essere esclusivamente configurata con gli optional previsti dal fabbricante ed installati da personale autorizzato e specializzato.

- Cinture pettorali
- Vassoi

---

## SICUREZZA

---

### **PORTATA MAX 90 Kg**

- **Usare esclusivamente per gli usi previsti dal fabbricante.**
- **Assistere sempre il paziente finché si alza o si siede dalla sedia.**
- **Frenare le ruote posteriori quando l'utilizzatore si alza e si siede sulla comoda.**
- **NON appoggiare i piedi sulla pedana in plastica durante la fase di alzata e seduta.**
- **Ogni uso diverso da quello previsto dal fabbricante può arrecare danni alla salute del paziente.**
- **Ogni eventuale modifica o rimessa a nuovo deve essere approvata dal fabbricante pena la decadenza del marchio CE.**
- **Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati dall'utilizzo scorretto o non previsto nel presente manuale.**

---

## SMALTIMENTO

---

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

I prodotti VAIMAS s.r.l. sono garantiti contro qualsiasi difetto di fabbricazione o di materiale per un durata di **mesi 24** (ventiquattro) a partire dalla data di consegna/acquisto, rilevabile da un regolare documento fiscale (fattura o scontrino).

Questa **Garanzia** è espressamente limitata alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei pezzi (manodopera esclusa) riconosciuti difettosi presso il Costruttore o le officine autorizzate dal Costruttore.

Qualsiasi sostituzione potrà essere effettuata con dei pezzi/componenti nuovi oppure riparando le parti, dopo un'attenta valutazione del Costruttore o del suo distributore.

Per l'applicazione della **Garanzia** è necessario rivolgersi al vostro distributore ed esibire il documento fiscale (scontrino o fattura) che comprovi la reale applicazione della presente **Garanzia** (data di acquisto/consegna del carrozzella). Le spese di spedizione e d'imballo, così come le spese di trasferimento, sono a carico dell'acquirente.

**Per l'eventuale rientro della merce è necessario chiedere l'autorizzazione.**

E' a discrezione del Vostro distributore addebitarvi tali spese in base alle condizioni di vendita praticate.

La **Garanzia** si applica a condizione che:

- il prodotto sia riparato presso il Costruttore o un suo distributore
- le manutenzioni periodiche menzionate nel Manuale d'uso siano state svolte regolarmente

Questa **Garanzia** non potrà essere applicata in caso di:

- incidenti, cadute, urti, uso improprio...
- manutenzione errata o insufficiente
- smontaggio, riparazione o modifiche effettuate da officine non autorizzate
- mancata conservazione della fattura o scontrino che comprovi l'avvenuto acquisto
- del prodotto

La **Garanzia** non copre:

- la manutenzione ordinaria, le regolazioni, la programmazione e le verifiche periodiche
- la sostituzione di pezzi sottoposti a normale usura dovuta all'uso del carrozzella
- tutte le spese non previste dalla presente **Garanzia Contrattuale**, o dalla **Garanzia Legale**, in particolare le spese conseguenti all'inutilizzo del carrozzella

Gli interventi realizzati a titolo di **Garanzia** non hanno l'effetto di prolungarla, salvo particolari disposizioni.

I pezzi o componenti sostituiti a titolo di **Garanzia** divengono di proprietà VAIMAS.

**AVVERTENZE** : le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.