

Invacare® LiNX

Kinbediening

nl **Bedieningskast**  
**Gebruikershandleiding**

Deze handleiding MOET aan de gebruiker van het product worden gegeven.  
LEES deze handleiding VOORDAT u dit product gebruikt en bewaar deze voor  
toekomstig gebruik.



**Yes, you can.®**

---

# Inhoud

---

<b>1 Algemeen</b>	<b>3</b>
1.1 Over deze handleiding	3
1.2 Garantie	3
1.3 Levensduur	3
1.4 Aansprakelijkheidsbeperking	3
1.5 Symbolen in deze handleiding	4
1.6 Algemene veiligheidsvoorschriften	4
1.7 Hoofdonderdelen	6
1.8 Onderhoud	6
<b>2 Montage</b>	<b>7</b>
2.1 Algemene informatie over de installatie	7
2.2 Kabels	7
2.3 De bedieningskast aansluiten	8
2.4 Handmatige kinbediening aanpassen	8
2.4.1 De joystick voor arm-/beenbesturing aanpassen	9
2.4.2 De eivormige schakelaar aanpassen	9
2.4.3 Het wegklapbare mechanisme aanpassen	10
2.5 Elektrische kinbediening aanpassen	10
2.5.1 De joystick voor arm-/beenbesturing aanpassen	10
2.5.2 Joysticks en schakelaars aanpassen op het scharnier	11
2.5.3 De hoogte van de scharnierschakelaar aanpassen	12

<b>3 Gebruik</b>	<b>13</b>
3.1 De handmatige wegklapbare kinbediening gebruiken	13
3.2 De elektrische wegklapbare kinbediening gebruiken	14

© 2024 Invacare Corporation

Alle rechten voorbehouden. Herpublicatie, duplicatie of gehele of gedeeltelijke wijziging is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invacare. Handelsmerken zijn te herkennen aan ™ en ®. Alle handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Invacare Corporation of haar dochterondernemingen, tenzij anders aangegeven.

---

# 1 Algemeen

---

## 1.1 Over deze handleiding

Dit document vormt een aanvulling op de gebruikersdocumentatie van het product.

Dit onderdeel zelf heeft geen CE- of UKCA-markering, maar maakt deel uit van een product dat voldoet aan richtlijn 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen van klasse I, en Part II UK MDR 2002 (zoals gewijzigd) Class I betreffende medische hulpmiddelen. Derhalve valt het onder de CE- en UKCA-markering van het product. Zie de gebruikersdocumentatie van het product voor meer informatie.

Gebruik dit onderdeel alleen als u deze handleiding hebt gelezen en begrepen. Ga voor meer informatie over het product en bij vragen over het juiste gebruik en eventuele aanpassing van het product naar een professionele zorgverlener die vertrouwd is met uw medische aandoening.

Omdat dit document betrekking heeft op alle beschikbare modellen (op de datum waarop dit document is gedrukt), zijn mogelijk niet alle delen relevant voor uw onderdeel. Indien niet expliciet anders wordt vermeld, verwijst elk hoofdstuk in dit document naar alle modellen van het onderdeel. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties van het onderdeel zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Controleer voordat u dit document leest of u de laatste versie hebt. De meest recente versie vindt u als pdf-bestand op de Invacare-website. Eerdere productversies worden mogelijk niet beschreven in de huidige revisie van deze handleiding. Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met Invacare.

Als u de lettergrootte in de gedrukte versie van het document moeilijk kunt lezen, kunt u de pdf-versie downloaden van de website.

In de pdf-versie kunt u de letters op het scherm aanpassen tot een grootte die u prettiger vindt.

Neem voor meer informatie over het onderdeel, bijvoorbeeld meldingen over veiligheid en terugroepingen, contact op met uw Invacare-vertegenwoordiger. Zie de adressen achter in dit document.

In geval zich een ernstig incident met het onderdeel voordoet, dient u de fabrikant en de bevoegde instantie in uw land daarvan op de hoogte te brengen.

## 1.2 Garantie

De garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het land waarin het product wordt verkocht.

## 1.3 Levensduur

De verwachte levensduur van dit product is vijf jaar, mits het strikt overeenkomstig het bedoelde gebruik wordt gebruikt, zoals beschreven in dit document, en als aan alle onderhouds- en servicevereisten wordt voldaan. De verwachte levensduur kan worden verlengd als het product voorzichtig wordt gebruikt en goed wordt onderhouden en als technische en wetenschappelijke ontwikkelingen niet leiden tot technische beperkingen. De levensduur kan ook aanzienlijk afnemen door extreem of onjuist gebruik. De verwachte levensduur voor dit product vormt geen aanvullende garantie.

## 1.4 Aansprakelijkheidsbeperking

Invacare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:

- Niet in acht nemen van de gebruikershandleiding
- Verkeerd gebruik
- Normale slijtage

- Verkeerde montage of afstelling door de koper of een derde
- Technische aanpassingen en/of ongeautoriseerde aanpassingen
- Gebruik van niet geschikte reserve-onderdelen

## 1.5 Symbolen in deze handleiding

In deze handleiding worden symbolen en signaalwoorden gebruikt die van toepassing zijn op gevaren of onveilige handelingen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Zie de onderstaande informatie voor de definities van de signaalwoorden.



### **WAARSCHUWING!**

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of overlijden als de situatie niet wordt vermeden.



### **VOORZICHTIG!**

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht of klein letsel als de situatie niet wordt vermeden.



### **LET OP!**

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot schade aan eigendommen als de situatie niet wordt vermeden.



### **Tips en aanbevelingen**

Nuttige tips, adviezen en informatie voor een efficiënt, probleemloos gebruik.



### **Gereedschap**

De vereiste gereedschappen en onderdelen die u nodig hebt voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden.

## Overige symbolen

(Niet van toepassing voor alle handleidingen)



### **Verantwoordelijke persoon in het VK**

Geeft aan dat een product niet in het Verenigd Koninkrijk is vervaardigd.



### **Triman**

Geeft de regels aan voor recyclen en sorteren van producten (alleen relevant voor Frankrijk).

## 1.6 Algemene veiligheidsvoorschriften



### **WAARSCHUWING!**

#### **Risico op letsel of beschadiging van de elektrische rolstoel**

Het is belangrijk dat u deze apparatuur pas installeert, onderhoudt of bedient nadat u alle instructies en alle handleidingen hebt gelezen die beschikbaar zijn voor dit product en voor alle andere producten die u samen met dit product gebruikt of installeert.

- Volg de instructies in de gebruikershandleidingen op.



### **WAARSCHUWING!**

#### **Risico op ernstig letsel, schade aan de elektrische rolstoel of aan de omgeving**

De elektrische rolstoel kan door verkeerde instellingen oncontroleerbaar of instabiel worden. Een ongecontroleerde of instabiele elektrische rolstoel kan een onveilige situatie, zoals een ongeluk, veroorzaken.

- De elektrische rolstoel mag uitsluitend worden afgesteld door gekwalificeerde technici of door personen die volledig op de hoogte zijn van de programmeringspara-



— meters, het afstelproces, de configuratie van de elektrische rolstoel en de vaardigheden van de bestuurder.

- Het mobiliteitshulpmiddel mag uitsluitend in droge omstandigheden worden afgesteld.



### WAARSCHUWING!

#### Risico op letsel of beschadiging van de elektrische rolstoel

Risico op onbedoelde beweging van de elektrische rolstoel of het zittingsysteem wanneer losse persoonlijke bezittingen (zoals sieraden en sjaals) rond de joystick verstrikt raken.

- Zorg dat losse voorwerpen uit de buurt van de joystick zijn als uw elektrische rolstoel ingeschakeld is.
- Schakel uw elektrische rolstoel onmiddellijk uit om elke beweging te stoppen.



### WAARSCHUWING!

#### Risico op letsel of schade als gevolg van kortsluiting

Zelfs als het systeem is uitgeschakeld, kunnen de connectorpinnen van kabels die op de stroommodule zijn aangesloten, nog onder stroom staan.

- Laat pinnen van kabels die onder stroom staan in de ingang zitten, zet ze vast of dek ze af (met niet-geleidende materialen), zodat ze niet door mensen kunnen worden aangeraakt en geen kortsluiting kunnen veroorzaken door contact met andere materialen.
- Wanneer kabels met pinnen die onder stroom staan moeten worden ontkoppeld, bijvoorbeeld wanneer de buskabel van de bedieningskast om veiligheidsredenen moet worden verwijderd, zorg er dan voor dat u de pinnen vastzet of afdekt (met niet-geleidende materialen).



### VOORZICHTIG!

#### Risico op letsel door onbedoelde beweging

Het is wenselijk dat de elektrische rolstoel, die is uitgerust met een Gyro-module, een rijfunctie met uitgeschakelde Gyro heeft. Als de elektrische rolstoel in een bewegend voertuig (zoals een boot, bus of trein) wordt gebruikt, werkt de Gyro-functie mogelijk niet en kunnen rijopdrachten resulteren in onbedoelde beweging van de elektrische rolstoel.

- Wanneer u in een bewegend voertuig rijdt, kies dan een rijfunctie met uitgeschakelde Gyros.
- Als de elektrische rolstoel geen rijfunctie met uitgeschakelde Gyro heeft, kunt u contact opnemen met de Invacare-leverancier.



### VOORZICHTIG!

#### Risico op letsel door hete oppervlakken

Bedieningskastmodule kan heet worden bij langdurige blootstelling aan sterk zonlicht.

- Stel de elektrische rolstoel niet gedurende lange periodes bloot aan direct zonlicht.



### LET OP!

Als u de connectorpinnen aanraakt, kunnen ze verontreinigd raken of beschadigd raken door elektrostatische ontlading.

- Raak de connectorpinnen niet aan.




### LET OP!

Het product bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren.

- Probeer niet om onderdelen te openen of te demonteren.

## 1.7 Hoofdonderdelen


### Handmatige kinbediening

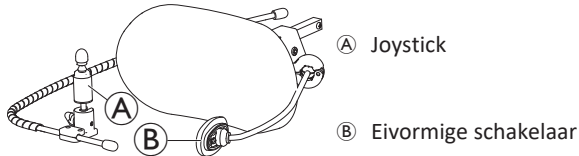

Ⓐ Joystick

Ⓑ Eivormige schakelaar

### Elektrische kinbediening

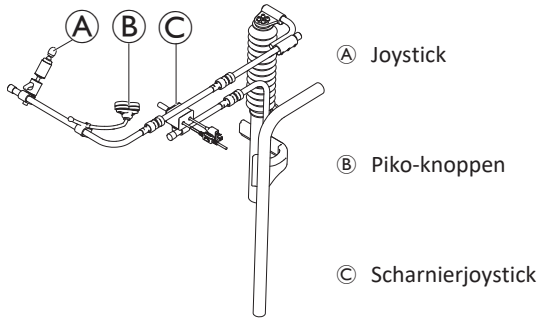

Ⓐ Joystick

Ⓑ Piko-knoppen

Ⓒ Scharnierjoystick

## 1.8 Onderhoud

- Houd alle elektronische onderdelen vrij van stof, vuil en vloeistoffen. Gebruik voor het reinigen van het product een doek die vochtig is gemaakt met zeepsop. Gebruik geen oplosmiddel of schuurmiddel; deze middelen kunnen het product beschadigen.

- Controleer elke maand of er geen onderdelen van het transportsysteem, zoals connectoren, aansluitpunten of kabels, loszitten, beschadigd zijn of roest vertonen. Zorg ervoor dat alle connectoren volledig zijn aangesloten. Bind alle kabels weg, zodat deze niet beschadigd raken. Vervang beschadigde onderdelen. Controleer of er vreemde voorwerpen of materialen aanwezig zijn en verwijder deze.
- Test elke 6 maanden alle functies van het bedieningssysteem om te controleren of deze correct werken.



### LET OP!

- De elektronica bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren.
  - Probeer onderdelen niet zelf te openen of repareren. Als u dat toch doet, vervalt de garantie en wordt de veiligheid van het systeem mogelijk aangetast.



Als er een onderdeel is beschadigd of als er inwendige schade kan zijn ontstaan (bijvoorbeeld door de bedieningskast te laten vallen), dient u de kast vóór gebruik te laten nakijken door gekwalificeerd personeel. Zie bij twijfel altijd de dichtstbijzijnde Invacare-leverancier.

## 2 Montage

### 2.1 Algemene informatie over de installatie

De taken die in dit hoofdstuk worden beschreven, hebben betrekking op de initiële installatie en moeten door opgeleide en bevoegde onderhoudstechnici worden uitgevoerd. Deze taken mogen niet door de gebruiker worden uitgevoerd.

### 2.2 Kabels

Om de rolstoel op een veilige en betrouwbare manier te kunnen gebruiken, moeten kabels en kabelbomen volgens de basisprincipes voor het aanleggen van voedingskabels worden geïnstalleerd.

Kabels moeten tussen hun aansluitpunt en eventuele buigpunten worden vastgezet, zodat de aansluitpunten tijdens het buigen niet onder spanning komen te staan.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Risico op lichamelijk letsel en schade aan de bedieningskast**

Beschadigde kabels hebben een hogere weerstand. Een beschadigde kabel kan plaatselijk heet worden of vonken genereren, waardoor brandbaar materiaal in de omgeving vlam kan vatten.

- Bij de installatie moet ervoor worden gezorgd dat de voedingskabels, waaronder de buskabel, niet beschadigd kunnen raken en niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen.



#### **LET OP!**

Kabels en bedieningskastmodules kunnen beschadigd raken als ze niet correct zijn geplaatst.

- Leg kabels en bedieningskastmodules zodanig aan dat deze niet worden blootgesteld aan fysieke krachten of beschadigingen, doordat deze bijvoorbeeld ergens achter blijven haken, geplet worden, bekneld raken of tegen voorwerpen aanbotsen of erlangs schuren.

Alle kabels moeten worden voorzien van de nodige trekcontasting en de grenzen voor mechanische krachten die voor de kabels en kabelbomen gelden, mogen niet worden overschreden.

Zorg ervoor dat connectoren en aansluitingen worden beschermd tegen spatwater en binnendringend water. Kabels met contrastekkers moeten in horizontale of neerwaartse richting worden geplaatst. Zorg ervoor dat alle connectoren volledig zijn aangesloten.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Risico op lichamelijk letsel en schade aan de bedieningskast**

Zelfs als het systeem is uitgeschakeld, kunnen de connectorpinnen van kabels die op de stroommodule zijn aangesloten, nog onder stroom staan.

- Laat connectorpinnen die onder stroom staan in het contact zitten of dek deze af, zodat deze niet door mensen kunnen worden aangeraakt en geen kortsluiting kunnen veroorzaken door contact met andere materialen.

Zorg ervoor dat de kabels niet buiten de rolstoel uitsteken, zodat deze niet verstrikt kunnen raken of door voorwerpen kunnen worden beschadigd. Let met name op bij rolstoelen met beweegbare onderdelen, zoals een zitlift.



### **WAARSCHUWING!**

#### **Risico op letsel of schade als gevolg van kortsluiting**

Continu contact tussen gebruiker en kabel kan resulteren in een gerafelde kabelhuls. Dit verhoogt het risico op elektrische schokken.

- Leid kabels nooit langs plaatsen waar deze voortdurend contact maken met de eindgebruiker.

Voorkom dat de buskabel en aansluitpunten bij het plaatsen van de buskabel te zeer onder trekspanning komen te staan. De kabel moet zo min mogelijk worden gebogen, zodat de levensduur wordt verlengd en onbedoelde schade beperkt blijft.



### **LET OP!**

Door regelmatig buigen kan de buskabel beschadigd raken.

- Het wordt aangeraden de buskabel te ondersteunen met een kabelketting op plaatsen waar de kabel regelmatig wordt gebogen. De ketting mag niet verder kunnen uitrekken dan de lengte van de buskabel. De kracht die op de kabel wordt uitgeoefend om deze te buigen, mag niet groter zijn dan 10 N.



Er dienen geschikte tests te worden uitgevoerd om de verwachte levensduur en het inspectie- en onderhoudsschema te bepalen/bevestigen.

## **2.3 De bedieningskast aansluiten**



### **VOORZICHTIG!**

#### **Risico op onbedoeld stoppen**

Als de stekker van de kabel van de bedieningskast kapot is, kan de kabel van de bedieningskast losraken tijdens het rijden. De bedieningskast kan opeens worden uitgeschakeld wanneer deze geen stroom meer krijgt. Dit leidt tot een onbedoelde stop.

- Controleer de stekker van de bedieningskast altijd op schade. Neem direct contact op met uw leverancier in geval van een beschadigde stekker.



### **LET OP!**

De stekker van de bedieningskast en de aansluiting passen op slechts één manier op elkaar.

- Duw ze niet te hard op elkaar.

1. Duw voorzichtig om de stekker van de kabel van de bedieningskast en de aansluiting op elkaar aan te sluiten. De stekker moet met een hoorbare klik vastklikken.

## **2.4 Handmatige kinbediening aanpassen**



### **WAARSCHUWING!**

#### **Gevaar voor letsel of overlijden**

Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren, wat kan resulteren in letsel of overlijden.

- Verwijder geen kleine onderdelen.
- Houd nauw toezicht op kinderen, huisdieren of mensen met een lichamelijke/ geestelijke beperking.



**VOORZICHTIG!****Risico op letsel en beschadiging**

Resterende bramen en ontbrekende einddoppen na wijzigingen aan stangen, zoals ingekorte stangen, kunnen leiden tot letsel of beschadiging.


- Verwijder bramen nadat u de te lange stang hebt ingekort.
- Plaats de einddop terug na het verwijderen van de bramen.
- Controleer of de einddop stevig vastzit.

**2.4.1 De joystick voor arm-/beenbesturing aanpassen****De diepte en hoogte aanpassen**

Zie 2.4.3 *Het wegklapbare mechanisme aanpassen, pagina 10.*

**De stand van de joystick aanpassen**


De joystick kan 360 graden worden gedraaid. Via een sleuf in de zijkant kunt u de joystick in een hoek van 90 graden plaatsen.

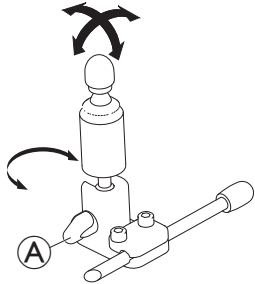

1. Draai de handschroef **A** los.
2. Draai het onderste gedeelte van de joystick om de sleuf in positie te brengen.
3. Pas de stand van de joystick aan. Desgewenst kunt u de joystick in een hoek van 90 graden in de sleuf vergrendelen.
4. Draai de handschroef vast.

**De positie op de houder aanpassen**

- Inbussleutel van 4 mm (5/32 inch)

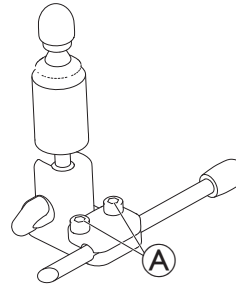

1. Draai de schroeven **A** los.
2. Plaats de joystick op de houder.
3. Draai de schroeven vast.


**2.4.2 De eivormige schakelaar aanpassen****De diepte en hoogte aanpassen**

Zie 2.4.3 *Het wegklapbare mechanisme aanpassen, pagina 10.*

**De stand van de schakelaar aanpassen**

De eivormige schakelaar kan 360 graden worden gedraaid.

- Dopsleutel van 11 mm (7/16 inch)

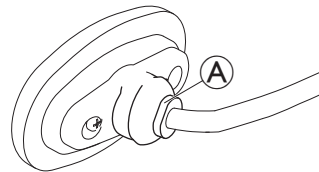


1. Draai de moer **A** los.
2. Pas de stand van de eivormige schakelaar aan.
3. Draai de moer vast.

### 2.4.3 Het wegklapbare mechanisme aanpassen

Het wegklapbare mechanisme kan voor verschillende opties worden gebruikt, zoals:

- PROTON-zijstukken van hoofdbediening
- Joystick voor arm-/beenbesturing, voor bediening met de kin
- Eivormige schakelaar

- 
- Inbussleutel van 4 mm (5/32 inch)
- 

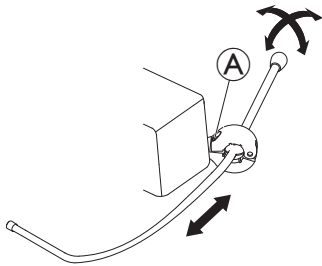

#### Diepte aanpassen

1. Draai de schroef A los.
2. Stel de stang af op de gewenste diepte.
3. Draai de schroef vast.

#### De positie aanpassen

1. Draai de schroef A los.
2. Zet het mechanisme in de gewenste positie.
3. Draai de schroef vast.

Het wegklapbare mechanisme kan 360 graden worden gedraaid.

## 2.5 Elektrische kinbediening aanpassen



### WAARSCHUWING!

#### Gevaar voor letsel of overlijden

Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren, wat kan resulteren in letsel of overlijden.

- Verwijder geen kleine onderdelen.
- Houd nauw toezicht op kinderen, huisdieren of mensen met een lichamelijke/ geestelijke beperking.



### VOORZICHTIG!

#### Risico op letsel en beschadiging

Resterende bramen en ontbrekende einddoppen na wijzigingen aan stangen, zoals ingekorte stangen, kunnen leiden tot letsel of beschadiging.

- Verwijder bramen nadat u de te lange stang hebt ingekort.
- Plaats de einddop terug na het verwijderen van de bramen.
- Controleer of de einddop stevig vastzit.

### 2.5.1 De joystick voor arm-/beenbesturing aanpassen

Zie “De stand van de joystick aanpassen” in 2.4.1 *De joystick voor arm-/beenbesturing aanpassen*, pagina 9.


## 2.5.2 Joysticks en schakelaars aanpassen op het scharnier

### Joysticks/schakelaars plaatsen

#### ! LET OP!

Als u de schroeven met een onjuiste momentsleutel aandraait, kunnen deze losraken of beschadigd raken.  
— Draai de schroeven aan met een moment van  $3 \text{ Nm} \pm 10 \%$ .

- Inbussleutel van 4 mm

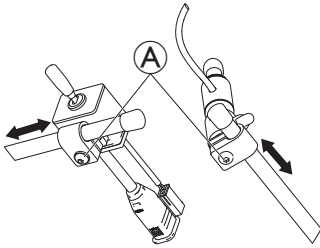


1. Draai de schroeven **A** los.
2. Schuif de joystick of schakelaar naar de gewenste positie op het scharnier.
3. Draai de schroeven vast.

### Piko-schakelaars plaatsen

#### ! LET OP!

Als u de schroeven met een onjuiste momentsleutel aandraait, kunnen deze losraken of beschadigd raken.  
— Draai de schroeven aan met een moment van  $3 \text{ Nm} \pm 10 \%$ .


- Inbussleutel van 4 mm
- Dopsleutel van 11 mm (7/16 inch)

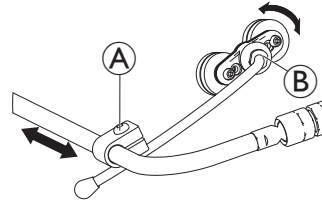

1. Draai de schroef **A** los.
2. Verplaats de houder naar de gewenste positie.
3. Draai indien nodig moer **B** los.
4. Pas de stand van de houder aan.
5. Draai de schroef **A** en de moer **B** vast.

### De hoogte en diepte van de het scharnier aanpassen

- Inbussleutel van 3 mm

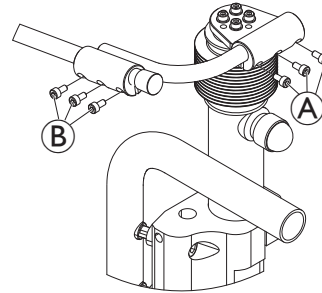

1. Draai de schroeven **A** (hoogteaanpassing) of **B** (diepteaanpassing) los.
2. Zet het scharnier in de gewenste positie.
3. Draai de schroeven vast.

## De stand van het scharnier aanpassen



Dit gedeelte heeft alleen betrekking op uitvoeringen met kogelscharnier.

U kunt ook de positie van de joysticks en bedieningskast aanpassen via kogelgewrichten in het scharnier. De kogelgewrichten zijn vrij beweegbaar en bieden oneindig veel aanpassingsmogelijkheden.




### LET OP!

Als u de kogelgewrichten met een onjuiste momentsleutel aandraait, kunnen deze losraken of beschadigd raken.

- Draai de kogelgewrichten aan met een moment van 35 Nm.

- Dopsleutel van 19 mm (2x)

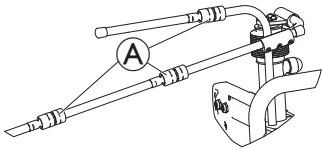


1. Maak het kogelgewricht **A** los.
2. Positioneer het scharnier.
3. Zet het kogelgewricht vast.

## 2.5.3 De hoogte van de scharnierschakelaar aanpassen



### LET OP!

Als u de klemhendel met een onjuist moment aandraait, kan de hendel losraken of beschadigd raken.  
— Draai de klemhendel slechts handvast.

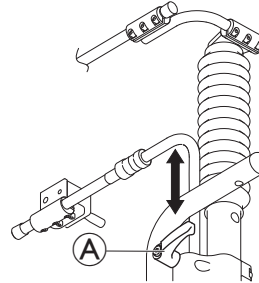

1. Maak de klemhendel **A** los.
2. Pas de hoogte van de scharnierschakelaar aan.
3. Zet de klemhendel vast.

## 3 Gebruik



### WAARSCHUWING!

#### Gevaar voor letsel of overlijden

Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren, wat kan resulteren in letsel of overlijden.

- Verwijder geen kleine onderdelen.
- Houd nauw toezicht op kinderen, huisdieren of mensen met een lichamelijke/ geestelijke beperking.



### VOORZICHTIG!

#### Gevaar voor letsel of beschadiging

Kleding of persoonlijke accessoires kunnen de correcte werking van kinbediening beperken of verhinderen.

- Controleer vóór het eerste gebruik of de kabels correct zijn aangesloten.
- Houd kleding en accessoires te allen tijde buiten het gebruiksbereik.



### LET OP!


Voorwerpen die niet bij de kinbediening horen, kunnen de bediening beschadigen.

- Hang geen voorwerpen zoals kleding of accessoires aan de kinbediening.


## 3.1 De handmatige wegklapbare kinbediening gebruiken

### Rijden

Voor deze proportionele joystick is minder kracht nodig voor de bediening dan een standaardjoystick.

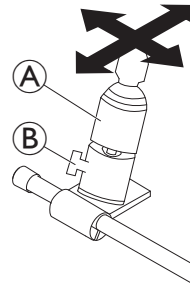

1. Beweeg de joystick **A** vanuit de neutrale stand in de gewenste richting.

 U kunt de vleugelmoer **B** gebruiken om de joystick naar uw behoefte af te stellen.



Zie de gebruikershandleiding van de hoofdbedieningskast voor meer informatie over rijden.

### Van functiekaart wisselen


Standaard is een eivormige schakelaar bevestigd aan de hoofdsteun. Deze schakelaar wordt gebruikt om van functie of profiel te wisselen.



Raadpleeg de gebruikershandleiding van de hoofdbedieningskast voor het bedienen van de elektrische zitfuncties en voor het verschil tussen functiekaart en profiel.

1. Druk kort op de eivormige schakelaar om van functiekaart te wisselen.
2. Druk lang op de eivormige schakelaar om van profiel te wisselen.

## De bedieningselementen naar binnen/buiten bewegen

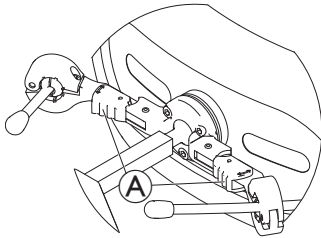


1. Druk op de vergrendeling **A** (achter de hoofdsteun) en draai de joystick of eivormige schakelaar naar binnen of naar buiten totdat deze op zijn plaats klikt.


## 3.2 De elektrische wegklapbare kinbediening gebruiken


### Rijden


Voor deze proportionele joystick is minder kracht nodig voor de bediening dan een standaardjoystick.

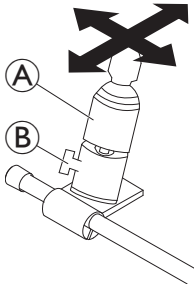

1. Beweeg de joystick **A** vanuit de neutrale stand in de gewenste richting.

 Zie de gebruikershandleiding van de hoofdbedieningskast voor meer informatie over rijden.

 Standaard zijn er twee Piko-knoppen op de kinbalk gemonteerd.

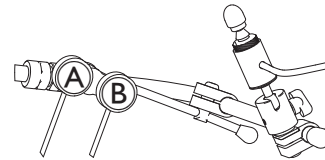


### De bedieningskast in-/uitschakelen

1. Druk op de rode Piko-knop **A** om de bedieningskast in of uit te schakelen.

### Van functiekaart wisselen


1. Druk kort op de zwarte Piko-knop **B** om over te schakelen naar een andere functiekaart.
2. Druk lang op de zwarte Piko-knop **B** om over te schakelen naar een ander profiel.

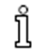 Raadpleeg de gebruikershandleiding van de hoofdbedieningskast voor het bedienen van de elektrische zitfuncties en voor het verschil tussen functiekaart en profiel.

## De kinbediening elektrisch naar binnen en naar buiten bewegen

Met de scharnierjoystick kunt u de beweging van de kinbediening besturen.

Zie de tabel voor mogelijke bewegingen:

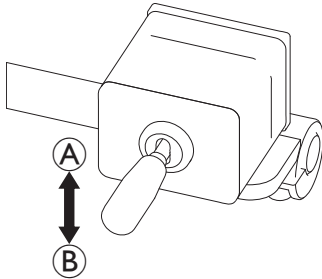

Stand van de joystick	Beweging
omhoog (A)	kinbediening beweegt naar boven en naar buiten
omlaag (B)	kinbediening beweegt naar beneden en naar binnen

1. Beweeg de scharnierjoystick in de gewenste richting totdat de kinbediening zich in de gewenste stand bevindt.



**Belgium & Luxemburg:**

Invacare nv  
Autobaan 22  
B-8210 Loppem  
Tel: (32) (0)50 83 10 10  
Fax: (32) (0)50 83 10 11  
marketingbelgium@invacare.com  
www.invacare.be

**Nederland:**

Invacare BV  
Galvanistraat 14-3  
NL-6716 AE Ede  
Tel: (31) (0)318 695 757  
nederland@invacare.com  
www.invacare.nl

---

**UKRP** Invacare UK Operations Limited  
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed  
Bridgend CF35 5AQ  
UK

1662741-C 2024-10-14



**Making Life's Experiences Possible®**



**Yes, you can.®**