

Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die gesamte Montageanleitung sorgfältig durch!

A. ZUBEHÖR

1. Höhenadapter 2 cm (4 Stück)
 - inkl. Umbausatz Art.-Nr. 15170
 - Erweiterungssatz ohne Umbausatz Art.-Nr. 14694
2. Montageanleitung (1 Seite)

B. MONTAGE DER VORDEREN HÖHENADAPTER

1. Den Saugendeckel (ist bereits im Lieferumfang des Gerätes enthalten) von unten aus der Grundplatte herausdrücken und den Knebelsauger (dieser kann nicht mehr verwendet werden) nach hinten herausziehen.
2. Den Saugendeckel wieder in die dafür vorgesehene Öffnung drücken.
3. Den Adaptereinsatz (4) so in die Bohrung einsetzen, dass die auf der Unterseite angebrachte Nase mit der auf der Grundplatte angebrachten Nut übereinstimmt.
4. Den Höhenadapter (1) mit dem dazugehörigen Gewindebolzen (2) von unten in das am Adaptereinsatz (4) befindliche Gewinde eindrehen.
5. Den beiliegenden neuen Sauger (3) in den Höhenadapter eindrehen.

C. MONTAGE DER HINTEREN HÖHENADAPTER

1. Den Sauger aus der Grundplatte am Gerät herausdrehen.
2. Den Höhenadapter (1) mit dem dazugehörigen Gewindebolzen (2) von unten in das an der Grundplatte befindliche Gewinde eindrehen.
3. Den vorher herausgedrehten Sauger in den Höhenadapter eindrehen.

