

7.1.1 Turvatarkastusluettelo

Säännölliset tarkistukset saa suorittaa vain sellainen henkilö, jolla on soveltuva ja asianmukainen pätevyys ja joka on perehtynyt hyvin nostimen kokoonpanoon, käyttöön ja huoltoon.

Tarkistuspäivä:	Nimikirjaimet:
PYÖRÄJALUSTA ☐ Tarkista, puuttuuko laitteita. ☐ Jalusta avautuu/sulkeutuu helposti. ☐ Tarkista pyörien ja akselipulttien kireys. ☐ Tarkista pyörien joustava kääntö ja pyörintä. ☐ Tarkista, ettei pyörissä ole roskia, ja poista mahdolliset roskat. ☐ Tarkista, etteivät kääntyvät osat ole kuluneet.	
NOSTOLIINAT JA LAITTEET ☐ Varmista kunnollinen kiinnitys ja potilaan turvallisuus tarkistamalla kaikki nostoliinan kiinnikkeet jokaisen käyttökerran yhteydessä. ☐ Tarkista, että nostoliinamateriaali ei ole kulunut. ☐ Tarkista, etteivät hihnat ole kuluneet. ☐ Tarkista ompeleet.	
SÄHKÖINEN TOIMILAITTEKOKOONPANO ☐ Tarkista, ettei kokoonpanossa ole vuotoja. ☐ Tarkista maston, puomin ja jalustan laitteet. ☐ Tarkista, ettei kokoonpano ole kulunut tai vaurioitunut. Jos kokoonpano on vahingoittunut, palauta se tehtäseen. ☐ Suorita käyttöjakso sähköisen toimilaitteen moitteettoman ja hiljaisen toiminnan varmistamiseksi.	

PUOMI

- ☐ Tarkista kaikkien laitteiden ja nostohenkarin tuet.
- ☐ Tarkista, ettei puomi ole vääntynyt tai taipunut.
- ☐ Tarkista, etteivät puomin pulttiliitokset ole kuluneet.
- ☐ Tarkista, että puomi on keskitetty jalustan jalasten väliin.
- ☐ Tarkista maston kääntöpultti. Varmista, että pultti on tiukasti kiristetty.
- ☐ Tarkista, etteivät kääntyvät osat ole kuluneet.
- ☐ Tarkista, näkyykö puomissa merkintä turvallisuudesta työskentelykuormasta.

MASTO

- ☐ Masto on asennettava tiukasti puumiin.
- ☐ Tarkista, ettei puomi ole vääntynyt tai taipunut.
- ☐ Tarkista, etteivät kääntyvät osat ole kuluneet.

NOSTOHENKARI

- ☐ Tarkista, etteivät pultit/koukut ole kuluneet tai vahingoittuneet.
- ☐ Tarkista, etteivät nostoliinan koukut ole kuluneet tai taipuneet.
- ☐ Tarkista, etteivät kääntyvät osat ole kuluneet.
- ☐ Tarkista kuluminen jousihaan kosketuskohdissa.
- ☐ Tarkista, jousihaka ei voi kiertyä koko kierrosta muoviosien sisällä. Jos se voi, muoviosat ovat kuluneet ja ne on vaihdettava. Katso kuva ④.
- ☐ Tarkista jousihakaa puomissa kannatteleva hitsattu tappi.
- ☐ Tarkista, että nostohenkarissa näkyy turvallisen työskentelykuorman merkintä.

PUHDISTUS

- ☐ Aina tarvittaessa.

④

