

Invacare® Birdie® – Tillegg

7.1.1 Sjekkliste for sikkerhetskontroll

Periodisk kontroll bør utføres av en kvalifisert person som er godt kjent med konstruksjon, bruk og stell av løfteren.

Kontrolldato:	Initialer:
STYREHJULSOKKEL ☐ Se etter deler som mangler. ☐ Basen åpner/lukker seg enkelt. ☐ Kontroller at styrehjulene og akselskruene er godt tilstrammet. ☐ Kontroller at styrehjulene dreier og ruller godt. ☐ Inspiser hjulene og fjern løse partikler. ☐ Inspiser dreieleddene med tanke på slitasje.	
LØFTESEIL OG DELER ☐ Kontroller alle løfteseilfester hver gang løfteseilet brukes, for å sikre at det er godt festet og at pasienten er trygg. ☐ Inspiser løfteseilmaterialet med tanke på slitasje. ☐ Inspiser stroppene med tanke på slitasje. ☐ Inspiser sømmene.	
ELEKTRISK LØFTEMOTORENHET ☐ Se etter lekkasje. ☐ Inspiser delene på masten, løftearmen og basen. ☐ Se etter tegn på slitasje eller skade. Send delen tilbake til fabrikken dersom den er skadet. ☐ Kjør en syklus for å kontrollere at den elektriske løftemotoren kjører jevnt og stille.	

LØFTEARMEN

- ☐ Kontroller alle deler og løftebøylefestene.
- ☐ Se etter knekker og ujevnheter.
- ☐ Inspiser de boltede leddene på løftearmen med tanke på slitasje.
- ☐ Kontroller at løftearmen er sentrert mellom beina på basen.
- ☐ Kontroller dreieskruen på masten. Kontroller at skruen er godt tilstrammet.
- ☐ Inspiser dreieleddene med tanke på slitasje.
- ☐ Kontroller at tillatt arbeidsbelastning er synlig angitt på løftearmen.

MASTEN

- ☐ Masten må være godt festet til løftearmen.
- ☐ Se etter knekker og ujevnheter.
- ☐ Inspiser dreieleddene med tanke på slitasje.

LØFTEBØYLEN

- ☐ Undersøk skruen/krokene med tanke på slitasje eller skade.
- ☐ Undersøk løfteseilkrokene med tanke på slitasje eller skade.
- ☐ Inspiser dreieleddene med tanke på slitasje.
- ☐ Undersøk om karabinkroken er slitt ved kontaktpunktene.
- ☐ Kontroller at karabinkroken ikke roterer helt i plastdelene. Hvis den gjør det, er plastdelene slitte og må byttes ut. Se Figur A.
- ☐ Kontroller sveisebolten som bærer karabinkroken på løftearmen.
- ☐ Kontroller at tillatt arbeidsbelastning er synlig angitt på løftebøylen.

RENGJØRING

- ☐ Etter behov.

A

