

Invacare® Birdie® – tillägg

7.1.1 Kontrollista för säkerhetsbesiktning

En person med lämpliga kvalifikationer som är välbekant med personlyftens utformning, användning och skötsel ska genomföra regelbundna besiktningar.

Datum för besiktning:	Initialer:
HJULUNDERREDE	
☐ Kontrollera om något material saknas.	
☐ Underredet kan enkelt fällas ut/in.	
☐ Kontrollera att hjul- och axelbultarna är åtdragna.	
☐ Kontrollera att hjulen vrider sig och rullar jämnt.	
☐ Kontrollera hjulen och ta bort smuts från dem.	
☐ Kontrollera pivåleder beträffande slitage.	
LYFTSELE OCH MONTERINGSMATERIAL	
☐ Kontrollera lyftsels alla fästen varje gång den används för att säkerställa att den fästs på rätt sätt och för att garantera patientens säkerhet.	
☐ Kontrollera lyftsels material beträffande slitage.	
☐ Kontrollera banden beträffande slitage.	
☐ Kontrollera sömmarna.	
ELEKTRISKT STÄLLDONSENHET	
☐ Kontrollera beträffande läckage.	
☐ Kontrollera materialet på masten, bommen och underredet.	
☐ Kontrollera beträffande slitage eller dåligt skick. Skicka tillbaka till fabriken vid skada.	
☐ Kör en cykel för att kontrollera att det elektriska ställdonet fungerar tyst och smidigt.	

BOM

- ☐ Kontrollera allt monteringsmaterial och alla lyftbygelstöd.
- ☐ Kontrollera om böjning eller deformation förekommer.
- ☐ Kontrollera bommens skruvfogar beträffande slitage.
- ☐ Säkerställ att bommen är centrerad mellan underredets ben.
- ☐ Kontrollera mastens pivåbult. Kontrollera att bulten är ordentligt åtdragen.
- ☐ Kontrollera pivåleder beträffande slitage.
- ☐ Kontrollera att det finns en synlig markering på bommen om tillåten belastning.

MAST

- ☐ Masten måste sitta fast ordentligt i bommen.
- ☐ Kontrollera om böjning eller deformation förekommer.
- ☐ Kontrollera pivåleder beträffande slitage.

LYFTBYGEL

- ☐ Kontrollera bulten/hakarna beträffande slitage eller skada.
- ☐ Kontrollera hakarna för lyftselen beträffande slitage eller deformation.
- ☐ Kontrollera pivåleder beträffande slitage.
- ☐ Kontrollera karbinhaken beträffande slitage vid kontaktpunkterna.
- ☐ Kontrollera att karbinhaken inte roterar helt inuti plastdelarna. I så fall innebär det att plastdelarna är slitna och behöver bytas ut.
Se bild [Ⓐ].
- ☐ Kontrollera den svetsade sprinten som bär karbinhaken vid bommen.
- ☐ Kontrollera att det finns en synlig markering på lyftbygeln om tillåten belastning.

RENGÖRING

- ☐ Vid behov.

Ⓐ

