

Invacare® Birdie® – Tillæg

7.1.1 Kontrolliste til sikkerhedseftersyn

Regelmæssige eftersyn skal foretages af en person med behørig uddannelse samt godt kendskab til personløfterens konstruktion, anvendelse og vedligeholdelse.

Dato for eftersyn:	Initialer:
SVINGHJULSUNDERSTEL	
☐ Kontrollér for manglende fastgørelsesanordninger.	
☐ Kontrollér, at understellet åbner/lukker let.	
☐ Kontrollér svinghjulenes og akselboltenes tilspænding.	
☐ Kontrollér, at svinghjulene svinger ud og kører uden problemer.	
☐ Kontrollér hjulene for snavs, og fjern eventuelt snavs.	
☐ Kontrollér drejeleddene for slitage.	
SEJL OG FASTGØRELSESANORDNINGER	
☐ Kontrollér alle sejlfastgørelser, hver gang de bruges for at sikre korrekt fastgørelse og patientsikkerhed.	
☐ Kontrollér sejlmaterialet for slitage.	
☐ Kontrollér stropperne for slitage.	
☐ Kontrollér sømmene.	
ELEKTRISK AKTUATORSAMLING	
☐ Kontrollér for lækage.	
☐ Kontrollér fastgørelsesanordningerne på mast, bom og understel.	
☐ Kontrollér for slitage og beskadigelse. Returner produktet til fabrikken, hvis det er beskadiget.	
☐ Lad den elektriske aktuator køre en omgang for at kontrollere for problemfri og støjsvag kørsel.	

BOM

- ☐ Kontrollér alle fastgørelsesanordninger og løftebøjleholdere.
- ☐ Kontrollér for bøjning, nedbøjning og udbøjning.
- ☐ Kontrollér bommens skruesamlinger for slitage.
- ☐ Kontrollér, at bommen er centreret mellem understellets ben.
- ☐ Kontrollér mastens drejebolt. Sørg for, at bolten er sikkert tilspændt.
- ☐ Kontrollér drejeleddene for slitage.
- ☐ Kontrollér, om den maksimale sikre arbejdsbelastning er anført synligt på bommen.

MAST

- ☐ Masten skal være sikkert samlet med bommen.
- ☐ Kontrollér for bøjning, nedbøjning og udbøjning.
- ☐ Kontrollér drejeleddene for slitage.

LØFTEBØJLE

- ☐ Kontrollér boltene/kroge for skader og slitage.
- ☐ Kontrollér sejlrogene for slitage og bøjninger.
- ☐ Kontrollér drejeleddene for slitage.
- ☐ Kontrollér karabinhagen for slitage på kontaktpunkterne.
- ☐ Kontrollér, at karabinhagen ikke drejer helt rundt i plastikdelene. Hvis det sker, betyder det, at plastikdelene er slidte og skal udskiftes.
Se figur A.
- ☐ Kontrollér den svejste stift, der holder karabinhagen på bommen.
- ☐ Kontrollér, om den maksimale sikre arbejdsbelastning er anført synligt på løftebøjlen.

RENGØRING

- ☐ Efter behov.

A

